


# Sistemas de Informação em Saúde

## DX 2020

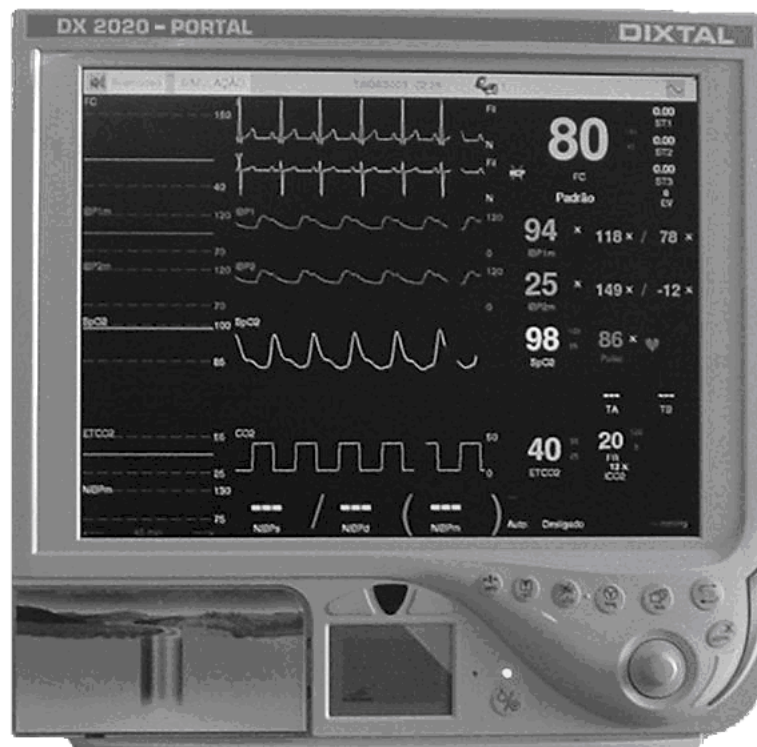

### MONITOR PORTAL

## Manual de Operação

DIXTAL BIOMÉDICA

# SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>04</b>
<b>2. SEGURANÇA</b>	<b>06</b>
2.1 Simbologia	07
2.2 Precauções	08
2.3 Cuidados com o Equipamento	09
2.4 Conexão com Outros Equipamentos	09
2.5 Embalagem, Transporte e Armazenamento	09
<b>3. INSTALAÇÃO</b>	<b>10</b>
3.1 Instalação Elétrica do Aparelho	10
3.2 Conexões	12
<b>4. OPERAÇÕES BÁSICAS</b>	<b>14</b>
4.1 Painel Frontal	14
4.2 Ligando o Aparelho	15
4.3 Painel de Controle	16
4.4 Funções das Teclas do Painel de Controle	16
<b>5. MENU PRINCIPAL</b>	<b>23</b>
5.1 Configurando o Aparelho	24
5.2 Alarmes	25
5.3 Ajustes	28
5.4 Paciente	32
5.5 Cálculos	38
5.6 Evolução	41
5.7 Lembretes	44
5.8 Eventos	45
5.9 Ajuda	45
<b>6. VISÃO DO PRODUTO</b>	<b>47</b>
6.1 Visão Frontal	47
6.2 Visão Lateral	48
6.3 Visão Traseira	49
6.4 Visão das Partes do Monitor	50
<b>7. MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO</b>	<b>51</b>
7.1 Manutenção Corretiva	51
7.2 Manutenção Preventiva Técnica	51
7.3 Manutenção Preventiva pelo Usuário	51
7.4 Limpeza e Desinfecção	52
7.5 Substituição dos Fusíveis	53
<b>8. PROBLEMAS E SOLUÇÕES</b>	<b>55</b>
<b>9. ACESSÓRIOS</b>	<b>56</b>

---

<b>10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>58</b>
10.1 Descrição do Produto	58
10.2 Classificação e Normalização	59
10.3 Especificações Gerais	62
<b>11. TERMO DE GARANTIA</b>	<b>63</b>
<b>12. DADOS DO FABRICANTE</b>	<b>64</b>

## 1

# INTRODUÇÃO

O DX 2020 é um Monitor de Sinais Vitais Modular com Vídeo Interno, produzido pela DIXTAL BIOMÉDICA destinado a ambientes hospitalares para monitorização dos sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatos, restrita a um paciente de cada vez.

O aparelho pode ser constituído por módulos internos pré-configurados e módulos externos.

Algumas das principais características do DX 2020:

- Alta flexibilidade na monitorização dos diversos parâmetros fisiológicos, através da configuração pelo usuário.
- Apresentação de curvas e parâmetros em Vídeo LCD Colorido de Matriz Ativa (sensível ao toque – opcional).
- A tecnologia portal que permite a integração com diversos recursos do meio em que está inserido, tais como: imagens médicas digitais (tomografias, ressonâncias, raios x, etc), prescrições, sistema de qualidade em terapia intensiva, câmeras de vídeo, entre outros recursos. Tudo isso na tela do próprio monitor, conferindo praticidade e rapidez na tomada de decisões.
- Comunicação com PACS através de protocolo DICOM.
- Ajuda na tela através do menu.
- Compatibilidade com HL7.
- Facilidade de operação através de controles na tela.
- Calculadora para auxílio em possíveis cálculos.
- Configuração automática através da inserção/retirada do(s) módulo(s) de expansão.
- Utilização de *pen drive* para atualizações de software ou ainda para gravação das informações do paciente e/ou monitor.
- Possibilidade de Integração com Central de Monitorização Fisiológica (com ou sem fio).
- Possibilidade de Impressão de dados e curvas por impressora laser, jato de tinta ou registrador térmico.
- Evolução de todos os parâmetros em formatos gráficos ou numéricos.
- Armazena eventos de alarme e suas mudanças de configuração, arritmias e também os eventos definidos pelo usuário.
- Possibilidade de visualização de *full disclosure*, permitindo ao usuário analisar os sinais quando ocorrido um evento.
- Alarmes sonoros e visuais.
- Possibilidade de acesso remoto às informações do paciente.
- Controles através de diversos dispositivos, tais como teclado, botão rotacional e/ou *touch pad* facilitando a programação.
- Módulo de bateria recarregável tornando-o independente da disponibilidade de energia da rede elétrica. (opcional)

**IMPORTANTE:** Dependendo da versão do monitor alguma(s) característica(s) citada(s) pode(m) não estar presente(s).

**Observações:**

- 1) Este manual descreve a operação e utilização de funções do DX 2020, sendo de fundamental importância a sua leitura prévia antes de utilizar o aparelho.
- 2) A não observância desta recomendação pode causar danos ao paciente e/ou aparelho devido à instalação ou operação incorreta.

# 2

## SEGURANÇA

O DX 2020 tem entradas isoladas e apresenta uma isolação elétrica maior que  $10M\Omega$  a 500VDC. A corrente de fuga que pode fluir do aparelho para o terra é limitada a menos de  $10\mu A$  a 240VAC.

O DX 2020 possui filtros de proteção que elimina qualquer risco de segurança quando utilizado simultaneamente com outros estimuladores elétricos tais como desfibrilador, marca passo cardíaco, etc.

Interferência eletromagnética externa em excesso pode interferir na aquisição dos sinais fisiológicos do paciente. Caso isto ocorra procure eliminar a fonte externa deste tipo de interferência.

A conexão de vários equipamentos em uma mesma rede de alimentação elétrica pode causar cargas eletrostáticas, surtos ou transientes elétricos, que podem induzir a flutuações nos sinais fisiológicos do paciente que não são de origem fisiológicas. As durações destas flutuações são limitadas pelo tempo de exposição do equipamento, mas não possuem efeitos que comprometam a precisão do equipamento e segurança do paciente, pois este possui entradas isoladas e filtros de proteção.

Quando aplicável, o tempo de recuperação após a descarga de um desfibrilador é menor que 30 segundos, exceto quando determinado nas normas particulares.

















**ATENÇÃO:**

Antes de iniciar a monitorização de um parâmetro fisiológico observar todas as informações e cuidados sobre operação e aplicação dos acessórios, pois o uso incorreto destes poderá causar danos ao paciente, tais como queimaduras e/ou choque elétrico.

O monitor DX 2020 segue todos os padrões EMC, mas o usuário deve estar atento aos riscos de interferência sobre o aparelho durante tratamentos específicos.

## 2.1 Simbologia

Tabela 1: Simbologia

SIMBOLOGIA COMUMENTE UTILIZADA	
	Consultar a documentação acompanhante sobre informações importantes.
	Consultar instruções de operação.
	Requer alimentação elétrica em corrente contínua (CC).
	Requer alimentação elétrica em corrente alternada (CA).
	Indicador de alimentação por bateria e local para conectar módulo de bateria.
	Indica que o alarme está silenciado – INOP permanente para todos os parâmetros.
	Indica que o alarme está silenciado temporariamente para todos os parâmetros.
	Alarme silenciado para um determinado parâmetro.
	Equipamento com parte aplicada tipo CF protegido contra descarga de desfibrilador.
	Equipamento com parte aplicada tipo BF protegido contra descarga de desfibrilador.
	Terminal de aterramento para equalização de potencial.
	Terminal de aterramento para proteção.
	Indicação de desligado / ligado para uma parte do equipamento.
	Número de catálogo e/ou código do produto.
	Produto de uso único, não reutilizar.
	Código de lote de fabricação.

	Número de série do dispositivo.
	Data de fabricação do dispositivo.
	Validade do dispositivo (caso aplique).
	Condições ambientais – limites de temperatura para o dispositivo.
	Condições ambientais – limites de umidade para o dispositivo.
	Condições ambientais – limites de pressão atmosférica para o dispositivo.
	Armazenagem e transporte - sentido de empilhamento das caixas.
	Armazenagem e transporte - material frágil manusear com cuidado.
	Armazenagem e transporte - manter seco.
	Armazenagem e transporte - quantidade máxima para empilhamento.
	Recolhimento de Equipamento elétrico e eletrônico de forma separada.

## 2.2 Precauções

**PRECAUÇÃO:** Indica uma condição potencialmente perigosa que pode provocar danos corporais. As advertências abaixo devem ser consideradas para evitar danos pessoais ao operador e ao paciente.

- **Risco de explosão:** Não utilize o aparelho na presença de gases inflamáveis no ambiente.
- **Risco de choque elétrico:** Nunca retire a tampa do aparelho, quando necessário deverá ser retirada apenas por pessoal qualificado.
- Sempre desligue o aparelho antes de limpá-lo. Não utilize sensores danificados, cabos com fio desencapado, com a isolação danificada, bem como utilize somente sensores e cabos originais.
- **Falha de funcionamento:** Se o aparelho não estiver funcionando adequadamente como descrito, não o utilize até que o problema seja sanado pelo pessoal qualificado.



## 2.3 Cuidados com o Aparelho

**CUIDADO:** Indica uma condição que pode provocar danos ao equipamento ou mau funcionamento.

- Mantenha o aparelho sempre em local adequado.
- Evite locais onde possa ocorrer derramamento de líquidos sobre o aparelho.
- Mantenha o aparelho e seus acessórios sempre limpos e em bom estado de conservação.
- Mantenha o aparelho em ambiente seco.
- Não utilize o aparelho se o mesmo estiver molhado ou com excesso de umidade.
- Não utilize o aparelho se este apresentar danos externos ou houver suspeita de queda.
- Conecte o aparelho sempre em locais onde a tomada possua aterramento elétrico.
- Nunca esterilize ou mergulhe o aparelho em líquidos.
- Nenhuma tensão mecânica deve ser aplicada a qualquer um dos cabos do equipamento, principalmente aqueles ligados ao paciente.
- Não exponha nem opere o aparelho e seus sensores em temperaturas extremas.

## 2.4 Conexão com Outros Equipamentos

Equipamentos conectados na interface analógica e/ou digital devem ser certificados de acordo com o respectivo padrão IEC. Além disso, todas as configurações devem estar de acordo com o sistema padrão.

## 2.5 Embalagem, Transporte e Armazenamento

O aparelho é embalado em caixa reforçada com espuma para amortecimento.

Durante o transporte a embalagem deve ser manuseada cuidadosamente para evitar danos ao aparelho.

Não armazene o aparelho e seus sensores a temperaturas superiores a +55°C (131°F) ou inferiores a -10°C (14°F) ou locais com possível derramamento de líquido. A umidade relativa do ar de 10% a 90% sem condensação e pressão atmosférica de 525mmHg a 760mmHg.

# 3

## INSTALAÇÃO

O monitor DX 2020 não requer cuidados especiais ou projeto específico para sua instalação além das recomendações dadas pelas boas práticas e normas de instalações e segurança elétricas hospitalares como, por exemplo, as normas **IEC 60364-710:2002** e **NBR 13534**.

O responsável pela instalação, manutenção e uso do equipamento deve se certificar que o equipamento está fixado em um suporte adequado e que as restrições de uso (ex: radiação, gases inflamáveis, temperatura e umidade) sejam respeitadas. O responsável deve também se certificar de que todos os usuários e operadores do equipamento sejam treinados para seu uso e tenham acesso aos seus manuais.


Se esses cuidados não forem tomados na instalação, os requisitos de performance e segurança podem ser comprometidos.

Após o término da vida útil do aparelho, o hospital deve entrar em contato com a DIXTAL ou um de seus representantes para se informar sobre os procedimentos de retirada do equipamento.

### 3.1 Instalação Elétrica do Aparelho

Antes de instalar o aparelho verifique se a tomada elétrica utilizada atende as especificações abaixo:

- Tomada fêmea de 3 pinos (padrão Nema 5-15P) (Fig. 1), sendo:
- 1 pino fase – fio preto
- 1 pino para o neutro (110VCA) ou fase (220VCA) – fio azul claro ou vermelho.
- 1 pino redondo, no centro, para terra – fio verde.

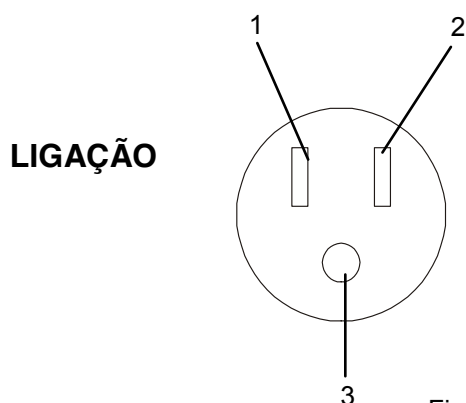

PINO	110V	220V
1	NEUTRO	FASE
2	FASE	FASE
3	TERRA	TERRA

Figura 1: Tomada Padrão Nema 5-15P.

- Tensão de alimentação isenta de variações (estabilizada).
- Ponto terra originado de barra de cobre montada no solo e com resistência menor que 10Ω.

**Observações:**

- 1) Alertamos o usuário da necessidade de suas instalações elétricas atenderem as normas **NBR 13534: 1995 – Instalações Elétricas em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Requisitos para Segurança e/ou IEC 60364-7-710: 2002 – Electrical installations of buildings – Part 7-710: Requirements for special installations or locations – Medical locations** que visam estabelecer condições mínimas de segurança e eficiência para a instalação elétrica do hospital, tanto por questão de segurança como também para a validade da garantia do aparelho. Esta recomendação tem como propósito tanto a segurança como a garantia do equipamento.
- 2) Na falta de alimentação elétrica, o equipamento emite um alarme sonoro e o LED da bateria pisca, para alertar ao usuário sobre a falta de energia elétrica ou fim da carga da bateria. Logo em seguida, o equipamento desliga, retornando automaticamente quando a alimentação elétrica estiver disponível. Neste caso são mantidas as últimas configurações ajustadas pelo operador.
- 3) O DX 2020 possibilita a conexão com módulo de bateria recarregável tornando-o independente da disponibilidade de energia da rede elétrica. Informações completas sobre instalação estão contidas no manual do módulo de bateria.
- 4) O DX 2020 não possui ventilação forçada para dissipar o calor emitido pela fonte de alimentação, assim é fortemente recomendada a instalação do equipamento com área livre em torno do mesmo de no mínimo 10cm, a fim de facilitar a dissipação de calor.
- 5) O DX 2020 não deve ser instalado em local não coberto e/ou exposto à luz solar direta.
- 6) Assegure-se de que o suporte sobre o qual está instalado o equipamento sustenta o máximo peso do equipamento com todos seus módulos e acessórios.
- 7) Fixe o monitor a fim de evitar que o mesmo seja empurrado ou puxado.

## 3.2 Conexões

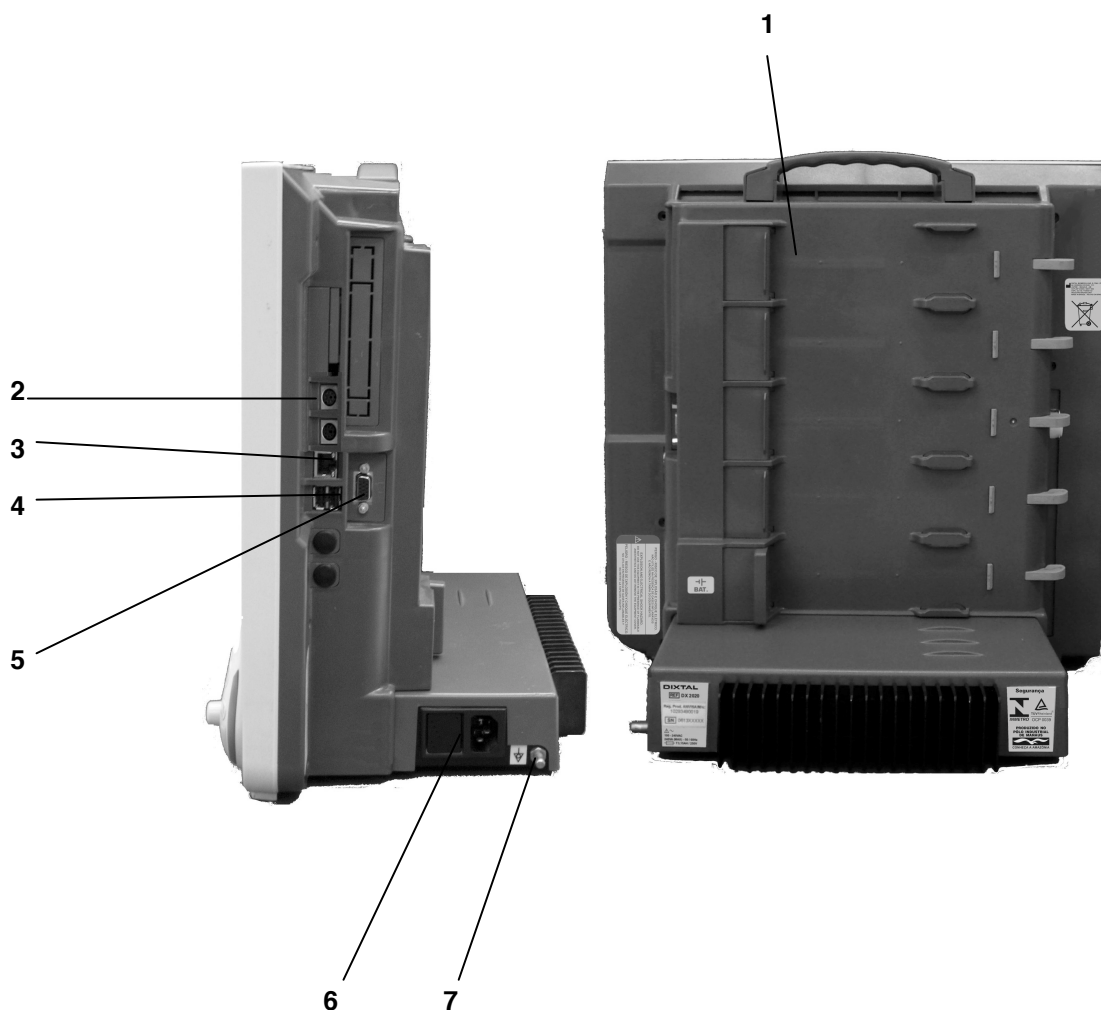


Figura 2: Conexões

### Observação:

- 1) Desenho ilustrativo de referência podendo variar de acordo com a configuração do aparelho.

O DX 2020 dispõe de diversas conexões externas, dentre as quais destacamos as mostradas na (Fig. 2):

Nº	DESCRIÇÃO CONECTOR	REQUISITOS DE SEGURANÇA E DETALHES	PADRÃO CONECTOR
1	Trilhos para conexão dos módulos externos.	Podem apenas ser usados com módulos específicos DIXTAL.	Padrão DIXTAL
2	Conexões padrão PS/2.	O usuário deve apenas conectar periféricos isolados, como teclados padronizados e mouses.	Teclado – 8042A.
3	Conexão Ethernet tipo RJ45.	Usado para interconexão com a Estação Central (protocolo proprietário usando TCP/IP) e a redes externas, somente através de especificações da engenharia da DIXTAL.	IEEE 802.3x.

4	Conexão padrão USB.	O sistema de conexão USB é usado para conectar <i>pen drives</i> externos, teclados, mouses, entre outros. O usuário deve apenas conectar dispositivos com consumo inferior a 750mA.	Interface Open Host Controller (OpenHC).
5	Saída de vídeo externo auxiliar.	A alimentação é fornecida pela placa mãe e está limitada a 750mA.	VGA – 1024 x 768 non-interlaced.
6	Entrada para cabo de rede elétrica e Porta Fusíveis de proteção.	O porta fusíveis atende os requisitos da norma médica EN 60601-1; Qualificado para uso em equipamentos de acordo com a EN 60950.	Fusível 3.15A com atraso.
7	Terminal de aterramento.	Utilizado para conexão de um cabo para aterramento de equalização de potencial, o qual deve ser conectado ao aparelho e a um ponto de aterramento. O uso deste conector é aconselhado sempre que for necessária a equalização do potencial (do terra protetor, não do terra funcional) entre o monitor e outro aparelho.	

### Observações:

- 1) Dependendo da versão adquirida da impressora, a Central de Monitorização e seus respectivos cabos não acompanham o aparelho. Demais acessórios, consultar manual de cada módulo.
- 2) Caso seja utilizado um condutor para equalização de potencial, esta conexão deve ser alocada de modo que seja evitada sua interrupção durante a utilização do aparelho.
- 3) Outros tipos de conexões poderão ser efetuados através de especificações da engenharia DIXTAL após análise do aparelho a ser conectado.

## 4

## OPERAÇÕES BÁSICAS

Este aparelho deve ser operado exclusivamente por profissionais habilitados

## 4.1 Painel Frontal

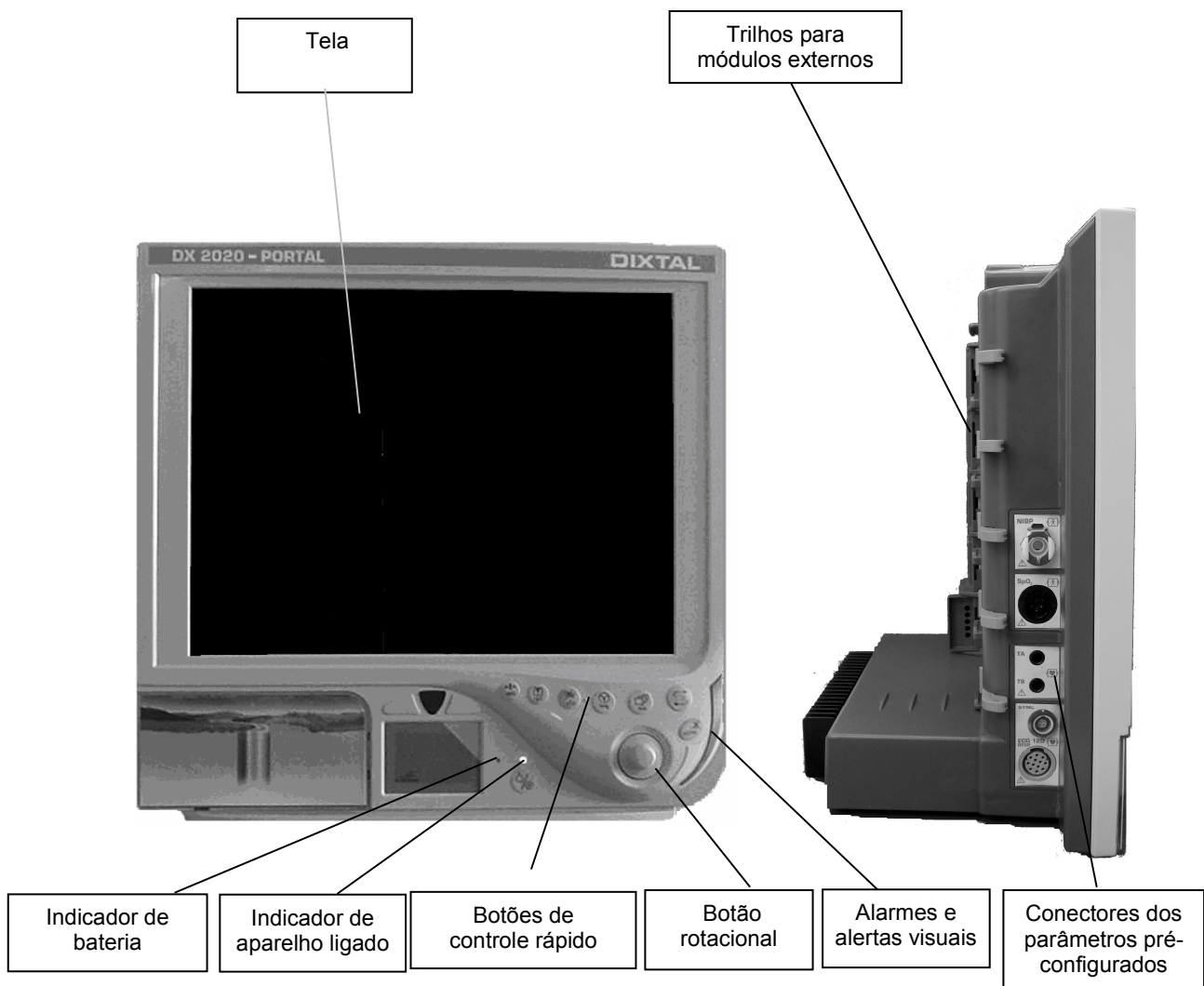




Figura 3: Painel Frontal e Lateral.

**Observação:**

- 1) Desenho ilustrativo de referência. Os parâmetros internos podem variar de acordo com a configuração do aparelho.

## 4.2 Ligando o Aparelho

- Conecte os cabos aos respectivos conectores e ao paciente, de acordo com os parâmetros a serem monitorizados.
- Ligue o equipamento, pelo botão  localizado no painel frontal, pressionando o mesmo por 01 segundo. Caso não tenha sido conectado o módulo de bateria ou o cabo de rede elétrica no DX 2020, após pressionado o botão , o aparelho emitirá uma seqüência de bips durante aproximadamente 60 segundos e em sincronismo com o bip o indicador de bateria estará piscando.
- Verifique se o indicador do aparelho ligado está aceso. (Fig. 3).
- Caso haja um desligamento da Energia Elétrica durante o funcionamento do aparelho, o mesmo emitirá uma seqüência de bips durante aproximadamente 60 segundos e em sincronismo com o bip o indicador de bateria estará piscando, desta forma informando que o aparelho foi desligado de forma incorreta.
- Após a inicialização, aparecerá a tela de monitorização e aparecerá na tela a pergunta: “Deseja apagar os dados do paciente anterior?”. Caso a pergunta não seja respondida em 30 segundos a mesma desaparecerá e os dados do paciente não serão alterados.

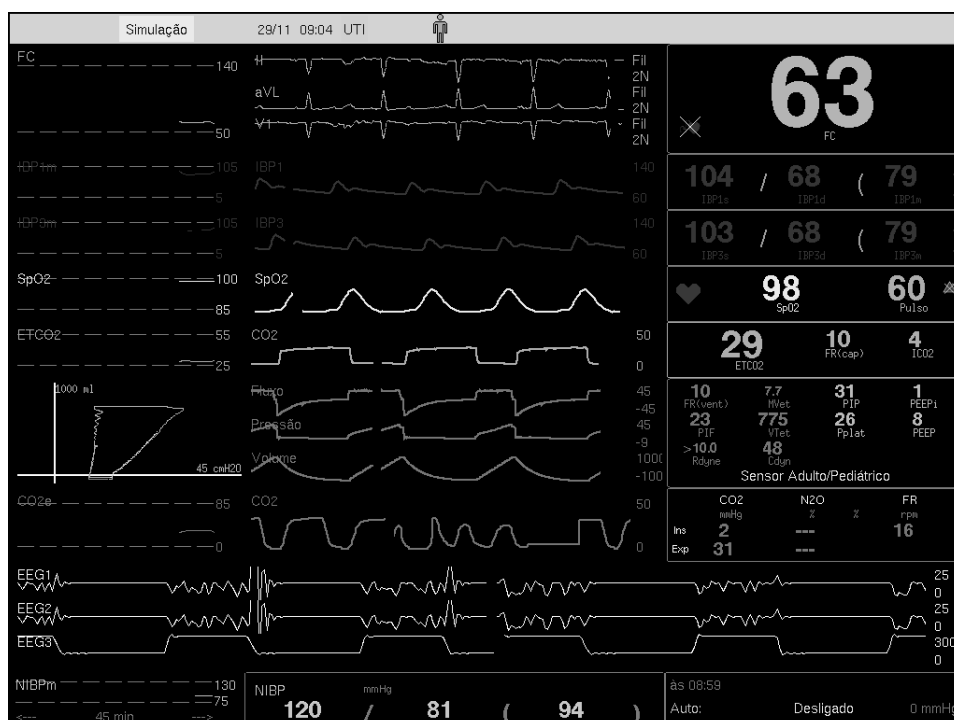


Figura 4: Exemplo da tela de monitorização.

**Observação:**

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

**Curvas**

Na tela de monitorização podem ser mostrados curvas e parâmetros, dentre outras informações.

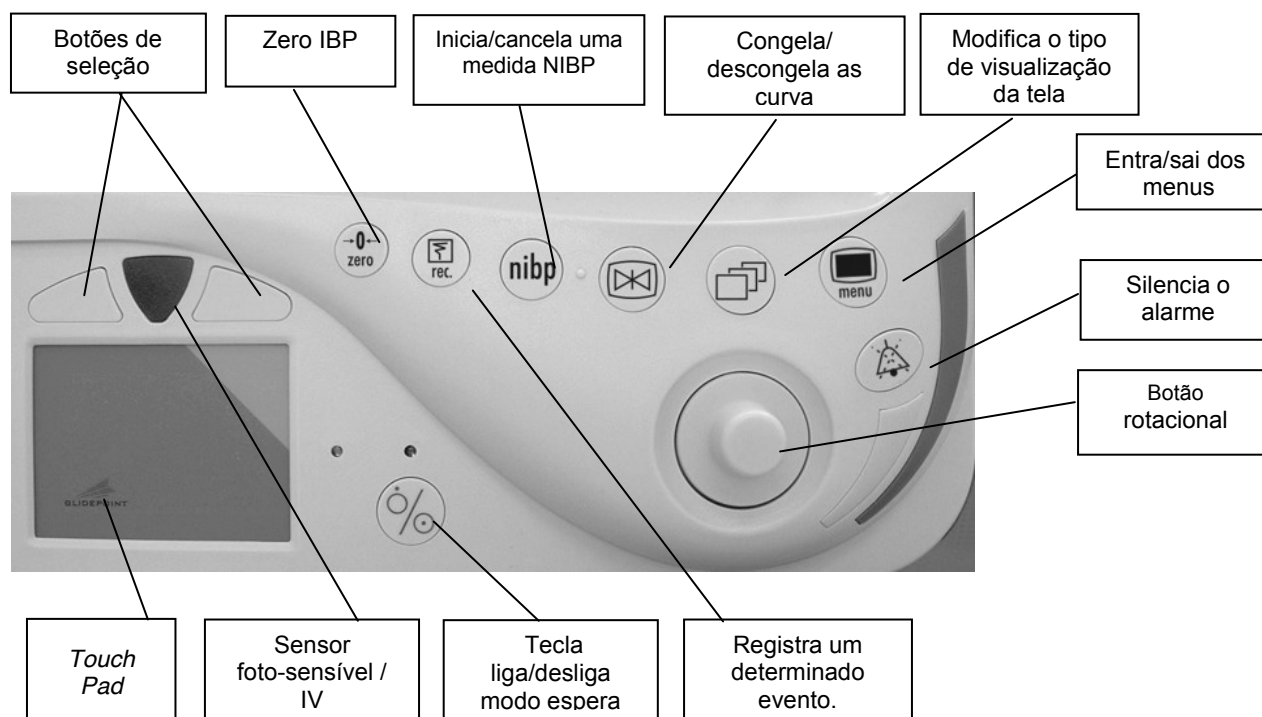
**4.3 Painel de Controle**

Figura 5: Painel de controle.

**4.4 Funções das Teclas do Painel de Controle**

- **Tecla liga/desliga e Modo Espera**



Pressione por um segundo para ligar o monitor. Quando ligado e pressionando a tecla por aproximadamente dois segundos o monitor entra no Modo Espera (deixa de monitorizar). Para retornar à monitorização o procedimento é o mesmo, ou seja, tecla pressionada por aproximadamente dois segundos.

Para desligar o equipamento basta pressionar a tecla por cinco segundos.




- **Tecla Menu**



Utilizada para entrar e sair da ficha de menu e sub-menus. Ao sair de qualquer menu ou sub-menu todas as alterações são salvas automaticamente.

- **Botão Rotacional**

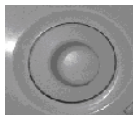

Pode ser utilizado para navegação na tela de monitorização, para configurar o aparelho e acessar as fichas de controle.

- Nas fichas de controle:
  - Selecione o controle desejado girando o Botão Rotacional (o comando em questão deverá estar em Laranja)
  - Pressione o Botão Rotacional para iniciar o ajuste do valor (a cor do comando mudará para azul).
  - Girando o Botão Rotacional (sentido horário ou anti-horário) o valor do controle é alterado, para mais ou para menos, para cima ou para baixo, de sim para não e etc.
  - Após o ajuste desejado, pressione novamente o Botão Rotacional para confirmar o valor ajustado.
  - Pressione ESC para encerrar os ajustes e sair da ficha do menu.
- Na tela de monitorização:
  - Girando o Botão Rotacional, um cursor Laranja se desloca na tela selecionando os diferentes módulos conectados (os módulos são divididos em históricos, curvas e parâmetros)
  - Pressione o Botão Rotacional para abrir o menu na ficha correspondente ao módulo selecionado
  - Nos módulos de ECG e IBP (Pressão Invasiva), ao se pressionar o Botão Rotacional sobre a área de curvas, a cor do cursor fica azul, e um novo cursor aparece, desta vez dentro da área de curvas.
    - Neste caso, selecione uma curva girando o Botão Rotacional e pressione novamente o mesmo (a cor do segundo cursor fica azul também)
    - Em seguida, girando-se o Botão Rotacional, é possível trocar a derivação de ECG ou o canal de IBP.
    - Pressionando-se o Botão Rotacional novamente, o cursor volta a ficar da cor Laranja, podendo selecionar-se outra curva.
  - A qualquer momento, pressionando-se a tecla ESC, o ultimo cursor que foi selecionado volta a ficar da cor Laranja e girando o Botão Rotacional, o cursor se desloca novamente.

- **Touch Pad**



Utilizado para deslocamento na tela como se fosse um mouse de computador, pode acessar qualquer ficha através do duplo clique (ou toque) em cima do parâmetro desejado. O clique (ou toque) pode ser utilizado também para alterar os valores desejados, selecionar opções dos fichários, entre outras funcionalidades.

- **Tecla Alarme**



Esta tecla é utilizada para o reconhecimento de um alarme sonoro ou visual. Ao pressionar esta tecla, o alarme é reconhecido imediatamente.

### Casos de Ativação da Tecla ALARME

- **Reconhecer a ocorrência de um alarme**

Nesse caso, a tecla alarme é utilizada para o reconhecimento de um alarme sonoro ou visual. Assim que ela for pressionada o alarme cessará por um período de 120 segundos. No canto superior esquerdo aparecerá um símbolo seguido por uma indicação “INOP” que ficará alterando com o tempo (em segundos) do intervalo que resta para a desativação.

- **Desativar o Áudio Temporariamente (Silenciamento Temporário)**

Nesse caso, a tecla alarme é utilizada para impedir que qualquer alarme sonoro dispare durante um intervalo de 120 segundos.

Para ativá-la pressione a tecla ALARME, no canto superior esquerdo da tela de monitorização aparecerá um símbolo e o tempo (em segundos) do intervalo que resta para o final da desativação.



Tempo restante de suspensão (silenciamento).


Utilize o silenciamento temporário durante o ajuste do equipamento, conexões, troca de cabos ou qualquer outro procedimento necessário que possa provocar o disparo indesejado de algum alarme.

Para desativar o silenciamento temporário, pressione novamente a tecla ALARME.

## ▪ Teste Automático do Alarme

Toda vez que o monitor é ligado é feita uma verificação automática do som e do sistema de alarme visual.

O operador pode verificar se o alarme visual está operante reiniciando o equipamento e observando se as lentes amarela e vermelha acendem por alguns segundos e, em seguida, se apagam. Além disso, será emitido um alarme sonoro de nível normal (3 toques) e será exibida a mensagem: “Teste automático do som e dos leds”.

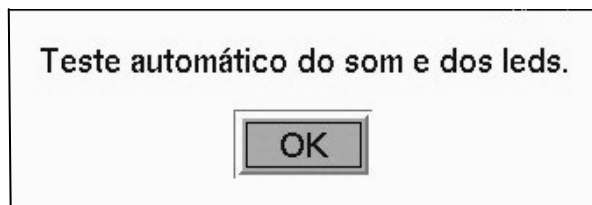

## ▪ Tecla Tela



Pressione para selecionar outro formato de tela do aparelho, dependendo da necessidade do usuário:

- **Formato de Tela 1:** Neste formato de tela são mostradas as evoluções em tempo selecionáveis, as formas de ondas e os valores numéricos (Fig. 6)

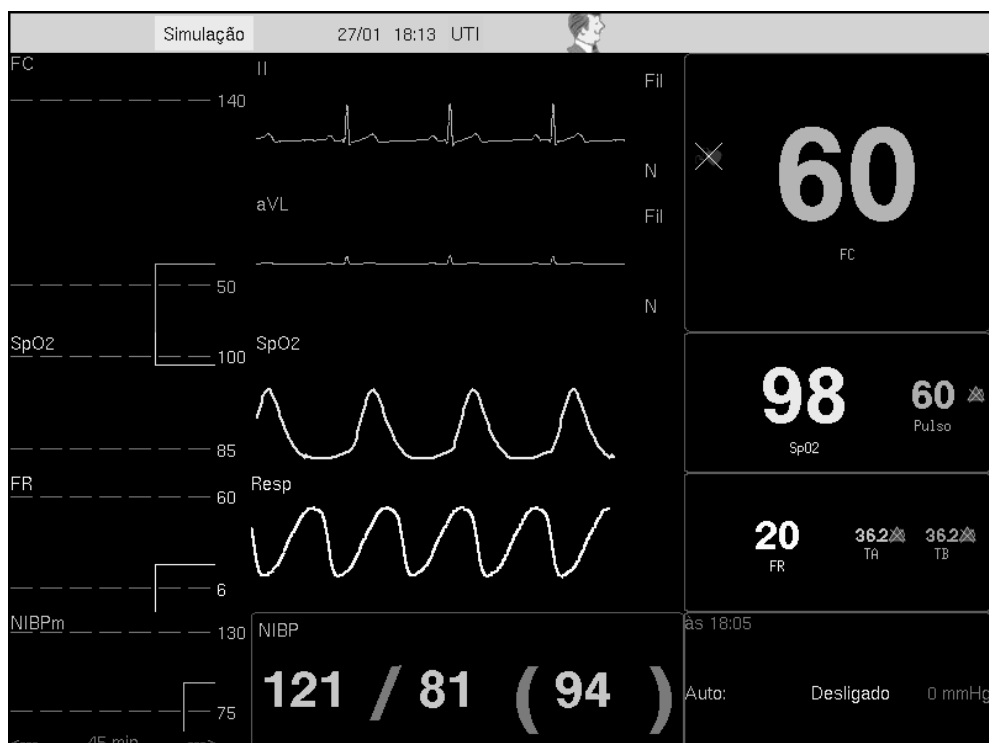


Figura 6: Formato de Tela 1.

**Observação:**

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
- **Formato de Tela 2:** Neste Formato de tela é dada ênfase às formas de ondas e também são mostrados os valores numéricos (Fig. 7).

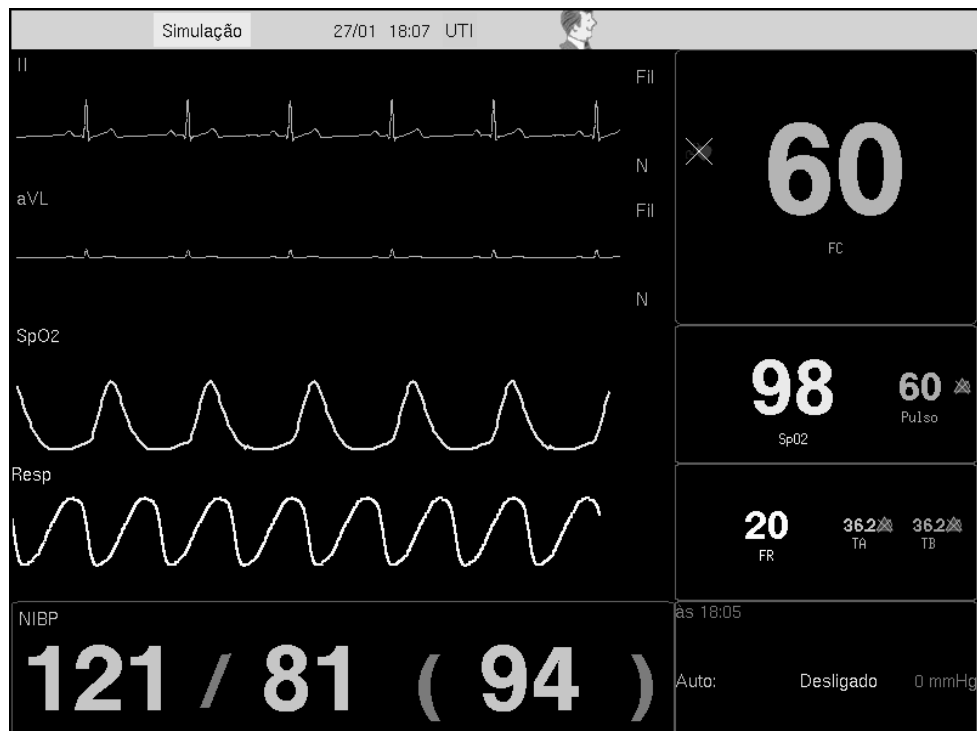


Figura 7: Formato de Tela 2.

**Observação:**

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

- **Formato de Tela 3:** Neste formato de tela é dada ênfase aos valores numéricos e também são mostradas as formas de ondas (Fig. 8).

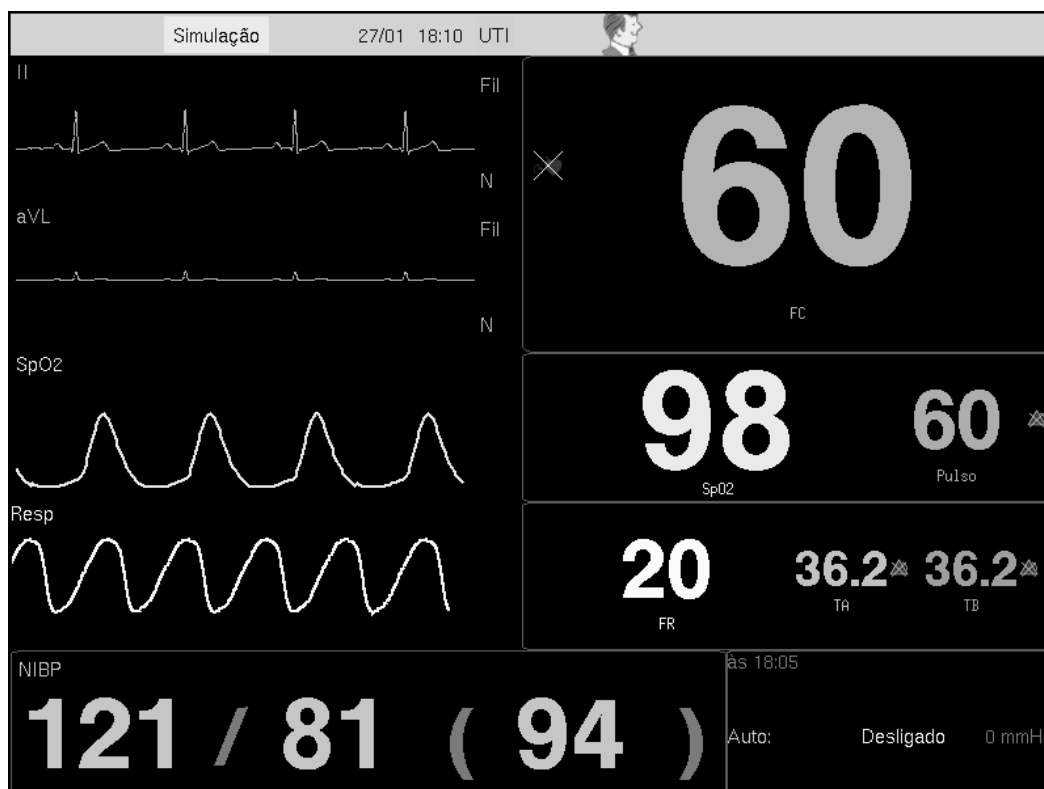


Figura 8: Formato de Tela 3.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

A tecla Tela também pode ser utilizada para acessar a tecnologia portal (outras aplicações), quando disponível, basta manter a tecla pressionada por cerca de 4 segundos.

- **Tecla Congela**



Esta tecla é utilizada para congelar e descongelar somente as formas de ondas na tela de monitorização, os valores numéricos não são congelados.

- **Tecla NIBP**



Esta tecla permite iniciar/cancelar diretamente uma medida de NIBP – pressão arterial não invasiva – sem que seja necessário entrar na ficha NIBP do menu principal. Para maiores informações consulte o manual do módulo de NIBP.



- **Tecla Registro**

Inicia e cancela a impressão das curvas exibidas na tela, desde que o módulo de impressão térmica (opcional) esteja conectado ao aparelho. Para maiores informações consulte o manual do módulo de registrador térmico.



- **Tecla Zero**

Utilize esta tecla para zerar o canal de pressão invasiva IBP (01 canal por vez ou todos simultaneamente) quando necessário. Para o mesmo ocorrer com segurança e confiabilidade primeiramente é necessário seguir as orientações do manual do usuário do referido módulo de IBP. Para maiores informações consulte o manual do módulo de pressão invasiva IBP.

# 5

## MENU PRINCIPAL

O menu principal é apresentado em forma de fichas, facilitando a configuração do aparelho.

Ele pode apresentar alguns tópicos fixos, tais como: AJUSTE, ALARMES, EVOLUÇÃO, CÁLCULO, PACIENTE, etc. e outros que podem ser adicionados ao menu principal de acordo com a configuração do equipamento.

Quando um novo módulo é conectado ao aparelho, a sua ficha é automaticamente adicionada ao menu principal e retirada quando o módulo é desconectado.

The screenshot displays the main menu of a medical device. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Alarmes', 'Paciente', 'ECG', 'SpO2', 'Resp', 'Cálculos', and 'NIBP'. Below this, the 'Paciente' section is active, showing three buttons: 'Dar alta', 'Editar', and 'Internar novo'. Underneath, the 'Internação' section contains a 'Registro' field with the value 'DX2020', a 'Data' field with '5 / Jan / 2006', and a 'Hora' field with '1 : 53'. The 'Paciente' section below that shows a dropdown menu with 'Neonato' selected, a 'Nome' field with 'RODRIGO', a 'Sexo' dropdown with 'Masc', an 'Idade' field with '3' and a unit dropdown with 'meses', and 'Altura' (32 cm) and 'Peso' (5133 g) fields. A help icon (?) is located at the bottom right of the patient information area.

Figura 9: Menu principal.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

## 5.1 Configurando o Aparelho

- Pressione a tecla liga/desliga no painel frontal para ligar o aparelho. Aparecerá a tela de monitorização (Fig. 4).
- Pressione a tecla ESC ou o Botão Rotacional ou ainda dê dois cliques (toques) no *Touch Pad* (com o cursor sobre a tela de monitorização) no painel de controle (Fig. 3) para ter acesso à tela do menu principal (Fig. 9).
- Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para escolher a ficha que deseja alterar ou consultar.
- Pressione o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para selecionar a ficha escolhida.
- Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para mover o cursor sobre os controles da ficha.
- Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para selecionar e depois alterar o valor dos controles e para confirmar uma opção.
- Para selecionar outra ficha, suba ao título da ficha, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* e selecione a ficha desejada.
- Pressione a tecla ESC para retornar à tela de monitorização e confirmar as alterações (Fig. 4).



## 5.2 Alarmes

Esta ficha de configuração pode selecionar o tipo de alarme e sua faixa. Ela se ajusta automaticamente de acordo com os módulos disponíveis no monitor.

A faixa de ajuste dos alarmes se encontra especificada no manual de cada módulo.

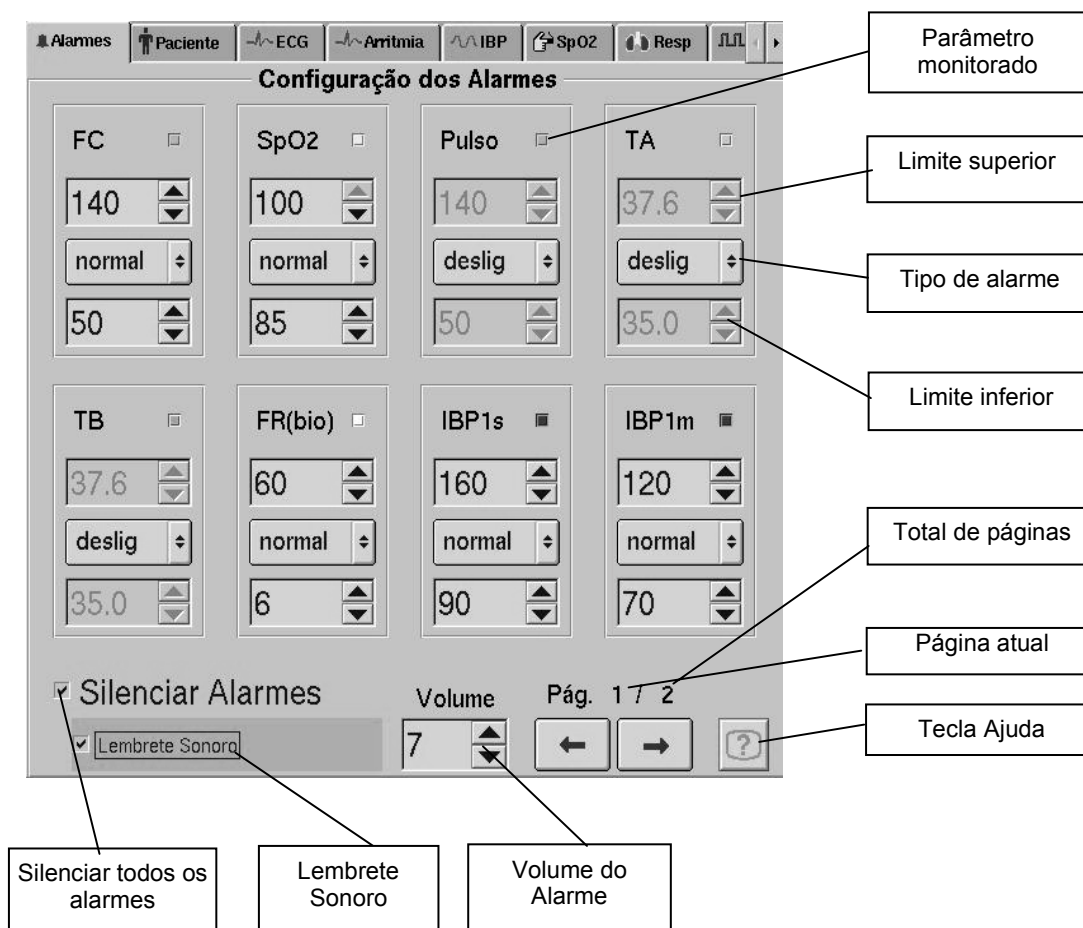


Figura 10: Ficha de alarmes.


### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

### Procedimento de Configuração de Alarmes

- Pressione a tecla ESC, o botão Rotacional ou dê dois cliques (toques) no *Touch Pad*. Aparecerá a tela do menu principal. Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para selecionar a ficha ALARME.
- Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para mover o cursor. Pressione o Botão Rotacional para selecionar a opção desejada.
- Altere o valor desejado utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.

- Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para mover o cursor e selecionar outra opção.
- Para ativar a funcionalidade de “Silenciar alarmes” deixe o respectivo checkbox selecionado (Fig. 10). Uma mensagem “Inop” aparecerá no canto superior da tela de monitorização.

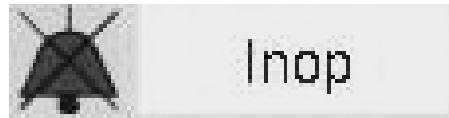

Para desativar o silenciamento definitivo (Inop), faça o mesmo procedimento descrito acima, mas desta vez, desmarcando o checkbox. Quando os alarmes sonoros estão silenciados, o monitor poderá emitir um bip (Lembrete Sonoro) a cada 2 minutos para lembrar o operador que a opção “Silenciar Alarmes” está ativada. O usuário pode permitir ou não que o operador tenha a opção de desabilitar o “Lembrete Sonoro” (bip a cada 2 minutos).

- Pressione a tecla ESC para retornar à tela de monitorização e confirmar os valores.

### Tipos de Alarmes

O monitor apresenta dois tipos de alarmes: fisiológico e técnico.

O alarme fisiológico é aquele relacionado às variáveis (parâmetro ou sinal) do PACIENTE.

O alarme técnico é relacionado ao monitor e seus acessórios. Exemplos: alarme fisiológico: limite de alarme da frequência cardíaca; alarme técnico: sensor desconectado.

### Níveis de Alarme

O monitor apresenta cinco níveis de alarme que podem ser definidos separadamente para cada parâmetro dependendo da necessidade do usuário. Em todos os casos, a partir do momento que a condição de alarme cessar, a sinalização sonora e visual também cessará. Tanto para os alarmes visuais quanto os sonoros, o sistema de alarmes suprime uma condição de alarme quando é iniciada uma condição de alarme relacionada a uma maior prioridade.

#### Descrição dos níveis de alarme:

- **Desligado:** Neste tipo de alarme, mesmo se o valor do parâmetro sair da faixa de alarme, nenhum aviso sonoro ou visual será emitido. Ao lado do parâmetro, na tela de Monitorização, será mostrado um ícone (🔕) indicando que o parâmetro está com o alarme desligado.
- **Visual:** Neste tipo de alarme apenas um aviso visual será emitido pelo monitor quando o parâmetro apresentar um valor fora da sua faixa. O parâmetro irá piscar com uma seta para baixo, indicando que o alarme está abaixo do limite inferior, ou para cima indicando que o alarme está acima do limite superior.

Além disso, a lente amarela (localizada no lado direito do painel inferior do aparelho) irá acender.

- **Discreto:** Neste tipo o monitor emitirá avisos visuais e sonoros. Após 10 segundos do disparo do alarme visual, se o parâmetro continuar fora da faixa, o alarme sonoro emitirá um som pouco agudo e que se repetirá a cada 15 segundos. Além disso, a lente amarela irá acender. Ao pressionar a tecla “Alarme” a sinalização cessará.
- **Normal:** Neste tipo o monitor emitirá avisos visuais e sonoros. Após 10 segundos do disparo do alarme visual, se o parâmetro continuar fora da faixa, o alarme sonoro, um som de tom mais agudo de 3 notas, será emitido a cada 3 segundos. Além disso, a lente amarela irá piscar. Ao pressionar a tecla “Alarme” a sinalização cessará.
- **Severo:** Neste tipo o monitor emitirá avisos visuais e sonoros. Os alarmes visuais e sonoros serão disparados ao mesmo tempo. O alarme sonoro é composto por 10 notas que são emitidas a cada 3 segundos. Além disso, a lente vermelha irá piscar. Ao pressionar a tecla “Alarme” a sinalização cessará.

#### Observação:

- 1) Alarmes Técnicos são considerados de baixa prioridade.

#### Alarme de Alerta de Funcionamento

Durante o disparo do alarme sonoro e visual de alerta de funcionamento poderá ser apresentada uma mensagem na tela de monitorização para que o próprio usuário possa solucionar o problema (Fig. 11).



Figura 11: Exemplo de Alerta.

#### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

#### Tempo de Retardo do Sistema de Alarme

O tempo de retardo do sistema de alarme por limites de parâmetros é variável de acordo com o nível de alarme escolhido pelo operador, a saber:

- Alarme Tipo Severo: imediato.
- Alarme Tipo Normal e Discreto: menor ou igual a 10 segundos.

**Observações:**

- 1) Exceto quando especificado em normas particulares.
- 2) O tempo de retardo do sistema de alarme de funcionamento serve para que, quando qualquer sensor seja desconectado acidentalmente, não ative o alarme. Isto possibilita que o sensor seja recolocado sem o disparo do alarme, quando aplicável, este tempo de retardo é menor que 5 segundos.
- 3) O atraso do reconhecimento do valor de cada parâmetro pelo monitor está documentado nos manuais específicos de cada módulo.

## 5.3 Ajustes

Esta ficha de configuração poderá selecionar o tipo de Visualização, o período de Evolução Monitorada, entre outros, como mostra a tabela 2.

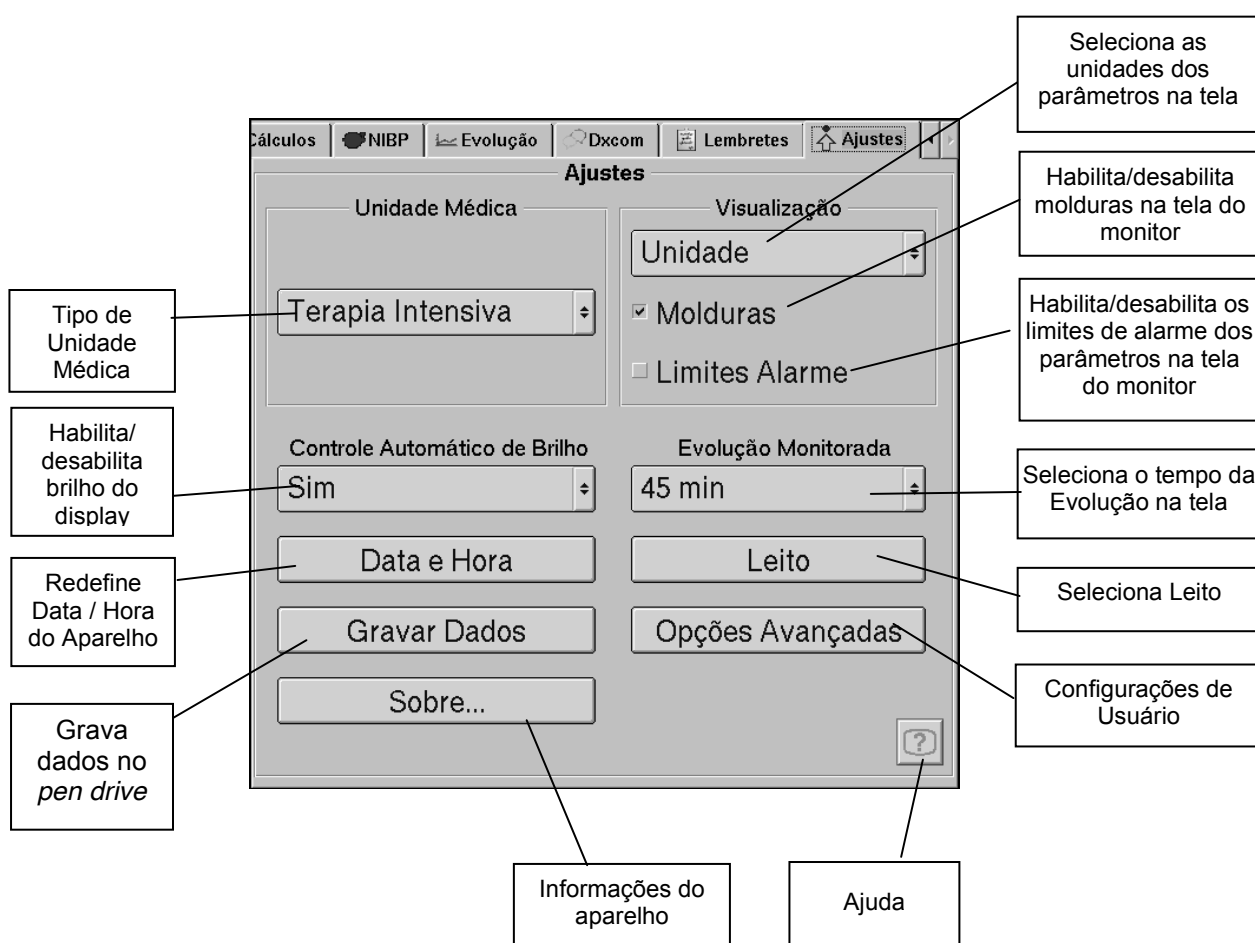


Figura 12: Ficha de Ajustes.

**Observações:**

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

Tabela 2: Opções da ficha de Ajustes.

CONTROLES	OPÇÕES
Unidade Médica	Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento, Diagnóstico
Unidades	Habilita / Desabilita
Molduras	Habilita / Desabilita
Limites Alarme	Habilita / Desabilita
Controle Automático de Brilho	Sim / Não
Evolução Monitorada	45 min., 90 min., 3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 96h
Data e Hora	---
Leito	---
Ajuda	---
Gravar Dados	---
Opções Avançadas	---
Sobre	---

### Procedimento de Configuração da Unidade Médica

- Selecione o controle Unidade Médica, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional ou clique (toque) com o *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com as opções de ambiente (Fig. 13), selecione a unidade utilizada.
- Confirme o Ambiente utilizado e pressione o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.

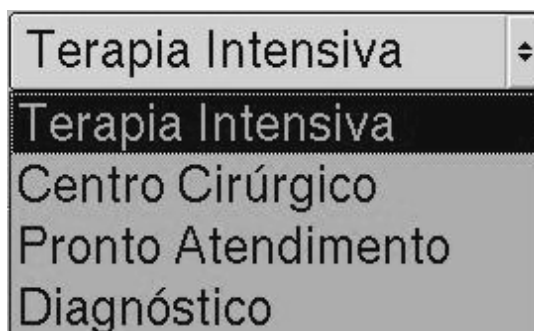


Figura 13: Tela de seleção da Unidade Médica.

### Observações:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
- 2) A configuração da Unidade Médica é importante, pois interferem diretamente nos limites de alarme pré-configurados entre outras funcionalidades sendo que os limites podem ser ajustados de acordo com o gosto do usuário, vide tópico ajustes e tipos de alarme.
- 3) A alteração da unidade médica altera a faixa de frequências da filtragem das curvas de ECG conforme a tabela abaixo:

**Tabela 3: Relação entre a Unidade Médica selecionada e a filtragem da curva de ECG.**

UNIDADE MÉDICA	NÍVEL ALARME	FILTRO ECG
Terapia Intensiva	Normal	Remove parcialmente o ruído de alta frequência causando pequena distorção na curva.
Centro Cirúrgico	Discreto	Remove o ruído de alta frequência causando uma maior distorção na curva.
Pronto Atendimento	Severo	Remove parcialmente o ruído de alta frequência causando pequena distorção na curva.
Diagnóstico	Normal	Sem filtro*

\* Controle do filtro na ficha de configuração de ECG (ver manual do módulo de ECG/RESPIRAÇÃO/TEMPERATURA item "Especificações Técnicas" para maiores detalhes)

### Procedimento de Configuração do Leito

- Configura o número do leito em que o DX 2020 está instalado.
- Selecione o controle LEITO, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com valores numéricos (Fig. 14).



Figura 14: Tela numérica para identificação do leito.

### Observações:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
  - 2) A configuração do número do Leito é importante, pois interfere diretamente na configuração da Central entre outras funcionalidades.
- Edite o número do leito, utilizando o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para mover o cursor e selecionar o número. Quando já houver um número editado, utilize a função ← para apagá-lo antes de editar o número.
  - Após editar o número do leito deve-se clicar no botão CONFIRMAR para confirmar o Leito escolhido.

## Procedimento para Gravar Dados

- Insira o *pen drive* no local indicado conforme figura 2.
- Selecione o controle Gravar Dados, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com as opções de dados a serem gravados.
- Selecione os tipos de dados a serem gravados (evolução, cálculos, dados do paciente, etc) utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Selecione o Formato dos Dados (Planilha ou HL7) a serem gravados, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Após o término da gravação deve-se clicar no botão SAIR utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* ou aperte a tecla ESC para retornar à ficha de ajustes.

## Configurações de Usuário

Existem algumas configurações que apenas o usuário, autoridade responsável pelo uso e manutenção do equipamento, pode alterar. Esta tela de configurações pode ser acessada a partir do botão “Opções Avançadas” na ficha “Ajustes”, e exige uma senha.

Algumas das configurações que podem ser feitas através desta sub-ficha de Opções Avançadas são, por exemplo:

- Alterar a unidade de parâmetros como, por exemplo, temperatura e EtCO<sub>2</sub>;
- Mostrar a opção “Silenciar alarmes” na ficha de alarmes – e desta forma permitir que os operadores possam fazê-lo;
- Desativar o lembrete sonoro indicando que o alarme está silenciado ou permitir que operadores desativem;
- Salvar a configuração de alarmes atual como padrão;
- Recuperar a configuração de fábrica;
- Alterar a senha para entrada na tela de Opções Avançadas;
- Alterar a prioridade dos parâmetros e curvas;
- Alterar a cor dos parâmetros e curvas;
- Carregar o logotipo de hospital para mostrá-lo no monitor;

### Observação:

- 1) A senha inicial para “Opções Avançadas” é “1234”. No entanto, esta senha deve ser alterada para assegurar que apenas o usuário (responsável pelo uso e manutenção do equipamento) tenha acesso a estas configurações.

## 5.4 Paciente

Esta ficha está relacionada com a configuração dos dados do paciente.

The screenshot shows a patient configuration interface with the following elements and callouts:

- Buttons:** "Dar alta ao paciente" (Dar alta), "Editar", "Internar novo paciente" (Internar novo).
- Internação Section:**
  - Registro: DX2020
  - Data: 5 / Jan / 2006
  - Hora: 1 : 53
- Paciente Section:**
  - Nome: Neonato
  - Nome: RODRIGO
  - Sexo: Masc
  - Idade: 3 meses
  - Altura: 32 cm
  - Peso: 5133 g
- Callouts:**
  - "Dar alta ao paciente" points to the "Dar alta" button.
  - "Edita registro de Internação do paciente" points to the "Registro" field.
  - "Data e hora da internação do paciente" points to the "Data" and "Hora" fields.
  - "Edita nome do paciente" points to the "Nome" field.
  - "Seleciona sexo do paciente" points to the "Sexo" dropdown.
  - "Seleciona altura do paciente" points to the "Altura" field.
  - "Internar novo paciente" points to the "Internar novo" button.
  - "Seleciona edição de dados do paciente" points to the "Editar" button.
  - "Seleciona tipo de paciente" points to the "Neonato" dropdown.
  - "Seleciona idade do paciente" points to the "Idade" field.
  - "Seleciona peso do paciente" points to the "Peso" field.
  - "Ajuda (?)" points to the help icon.

Figura 15: Ficha de configuração de paciente.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

### Procedimento de Configuração dos dados do paciente e do registro de Internação

#### Registro de Internação

- Selecione o controle EDITAR em seguida INTERNAÇÃO, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com valores alfanuméricos (Fig. 16).





Figura 16: Tela alfanumérica para identificação do paciente.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
- Edite o número ou nome de registro de internação do paciente, utilizando o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para mover o cursor e selecionar a letra ou número. Quando já houver um nome ou número editado, utilize a função ← para apagá-lo antes de editar o nome.
  - Para sair e confirmar os dados utilize a função SAIR ou pressione a tecla ESC.
  - Pressione novamente a tecla ESC para voltar à tela de monitorização.

### Nome do Paciente

- Selecione Editar e em seguida o controle NOME, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com valores alfanuméricos (Fig. 17).



Figura 17: Tela alfanumérica para identificação do nome do paciente.

**Observação:**

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
- Edite o nome do paciente, utilizando o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para mover o cursor e selecionar a letra ou número. Quando já houver um nome editado, utilize a função ← para apagá-lo antes de editar o nome.
  - Para sair e confirmar os dados utilize a função SAIR ou pressione a tecla ESC.
  - Pressione novamente a tecla ESC para voltar à tela de monitorização.

**Idade do Paciente**

- Selecione Editar e em seguida o controle IDADE, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com valores numéricos (Fig. 18).



Figura 18: Tela numérica para identificação da idade do paciente.

**Observação:**

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
- Edite a idade do paciente, utilizando o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para mover o cursor e selecionar o número. Quando já houver um número editado, utilize a função ← para apagá-lo antes de editar o número.
  - Para sair e confirmar os dados utilize a função CONFIRMAR.
  - Para sair e manter o valor antigo pressione CANCELAR ou ESC.
  - Selecione a unidade da idade (dias, meses ou anos)
  - Pressione novamente a tecla ESC para voltar à tela de monitorização.

**ATENÇÃO:** Independente da inserção da Idade do paciente, o tipo do paciente deve ser alterado para não acarretar medidas incorretas.

### Altura do Paciente

- Selecione Editar e em seguida o controle ALTURA, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com valores numéricos (Fig. 19).



Figura 19: Tela numérica para identificação da altura do paciente.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
- Edite a altura do paciente (em centímetros), utilizando o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para mover o cursor e selecionar o número. Quando já houver um número editado, utilize a função ← para apagá-lo antes de editar o número.
  - Para sair e confirmar os dados utilize a função CONFIRMAR.
  - Para sair e manter o valor antigo pressione CANCELAR ou ESC.
  - Pressione novamente a tecla ESC para voltar à tela de monitorização.

### Peso do Paciente

- Selecione Editar e em seguida o controle PESO, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com valores numéricos (Fig. 20).



Figura 20: Tela numérica para identificação do peso do paciente.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
  - Edite o peso do paciente, utilizando o Botão Rotacional ou clique com o *Touch Pad*. Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para mover o cursor e selecionar o número. Quando já houver um número editado, utilize a função ← para apagá-lo antes de editar o número.
  - Para sair e confirmar os dados utilize a função CONFIRMAR.
  - Para sair e manter o valor antigo pressione CANCELAR ou ESC.
  - Selecione a unidade do Peso (Kg ou g)
  - Pressione novamente a tecla ESC para voltar à tela de monitorização.

### Tipo de Paciente

- Esta configuração efetua o ajuste do tipo de paciente sob Monitorização do DX 2020. Esta configuração é utilizada pelo módulo de NIPB (pressão arterial não invasiva) para ajustar o tipo de paciente que está acoplado ao DX 2020, alterando a pressão interna do manguito utilizado e o algoritmo de cálculo. Efetua também os ajustes básicos dos níveis e tipos de alarme de acordo com o paciente escolhido.
- Selecione Editar e em seguida o controle PACIENTE, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com os tipos de paciente (Fig. 21).
- Selecione o tipo de paciente, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.

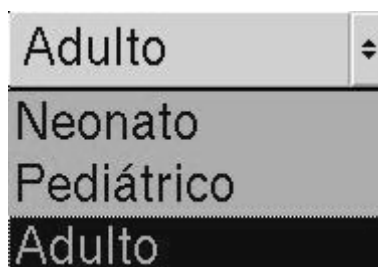


Figura 21: Tela seleção de tipo de paciente.

**Observações:**

- 1) O ajuste incorreto desta configuração pode acarretar medidas incorretas de NIBP e excessiva pressão de enchimento do manguito para pacientes NEONATOS
- 2) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
- 3) A alteração do tipo de paciente provoca alteração dos valores dos limites de alarme de acordo com a configuração de fábrica, mostrada a seguir:

	Neonato	Pediátrico	Adulto
<b>FC</b>	80 – 180	60 – 150	Configuração de Fábrica
<b>NIBPs</b>	40 – 80	80 – 150	Configuração de Fábrica
<b>NIBPm</b>	20 – 60	55 – 115	Configuração de Fábrica
<b>NIBPd</b>	10 – 50	40 – 100	Configuração de Fábrica
<b>Pulso</b>	80 – 180	60 – 150	Configuração de Fábrica
<b>FR</b>	20 - 120	15 - 80	Configuração de Fábrica

- Após selecionar novo tipo de paciente aparecerá uma tela de confirmação (Fig. 22).

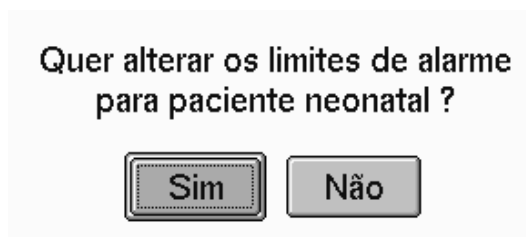


Figura 22: Permissão para alterar os limites de alarme.

**Observação:**

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
- Se o usuário clicar no botão “Sim” os limites de alarme serão alterados.
  - Se clicar no botão “Não” os limites de alarme serão mantidos.
  - Pressione novamente a tecla ESC para voltar à tela de monitorização.

**Sexo do Paciente**

- Selecione Editar e em seguida o controle SEXO, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com as opções de sexo do paciente (Fig. 23).

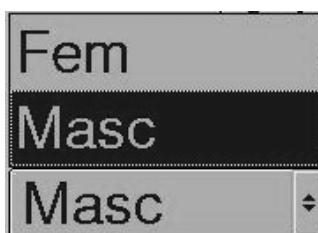


Figura 23: Tela seleção do sexo de paciente.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
- Selecione o tipo de paciente, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
  - Pressione novamente a tecla ESC para voltar à tela de monitorização.

### Alta Paciente

- Selecione o controle DAR ALTA, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*. Aparecerá uma tela de confirmação de alta do paciente.

### Internar Novo Paciente

- Selecione o controle Internar novo, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*. Aparecerá uma tela de confirmação de internação do paciente.

## 5.5 Cálculos

Esta ficha possibilita calcular e visualizar alguns cálculos que utilizam informações de vários dos módulos conectados no monitor, por exemplo, os cálculos Hemodinâmicos e Ventilatórios do paciente. Dependendo da versão do software há disponibilidade, inclusive, do cálculo de drogas.

Dentre os cálculos hemodinâmicos estão informações que podem ser capturadas ou inseridas, como por exemplo:

- Peso e altura do paciente;
- FC, CO, PADm, PAPm, PCPm, PÁS, PAm, PAd;

E informações que podem ser calculadas, como por exemplo:

- ASC, VS, IC, IS, TSVE, ITSVE, RVS, IRVS, dentre outras;

Da mesma maneira, na ficha de cálculos respiratórios temos informações que podem ser capturadas ou inseridas, por exemplo:

- FiO<sub>2</sub>, PBar, Hb, pH, PaCO<sub>2</sub>, dentre outras;

E outras que podem ser calculadas, como por exemplo:

- CaO<sub>2</sub>, CvO<sub>2</sub>, VO<sub>2</sub>, DO<sub>2</sub>, TO<sub>2</sub>, dentre outras;

### Observação:

- 1) Ao lado dos dados do paciente há uma lista de cálculos. Conforme os dados necessários são capturados ou incluídos, os cálculos serão realizados automaticamente e apresentados na tela da ficha de cálculos. Os valores apresentados em vermelho são aqueles que estão fora dos limites de normalidade e os valores em azul estão dentro dos limites de normalidade segundo literatura médica.

### Procedimentos de configuração dos valores Hemodinâmicos e Ventilatórios do Paciente

- Selecione o controle Cálculos na ficha do menu. Aparecerá uma tela de cálculos com fichas, tais como: Hemodinâmicos e Ventilatórios.
- Utilize o controle CAPTURAR para capturar os dados do sistema.
- Utilize o controle APAGAR para apagar os dados do sistema.
- Para alterar ou incluir um valor não capturado, posicione o cursor sobre esse valor e pressione o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com valores numéricos. Selecione o valor desejado utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*. Quando já houver um número editado, utilize a função ← para apagá-lo antes de editar o número.

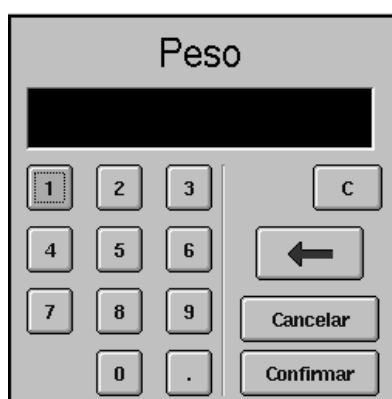


Figura 24: Tela numérica para identificação do peso do paciente.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.
- Para sair e confirmar os dados utilize a função CONFIRMAR.
  - Para sair e manter o valor antigo pressione CANCELAR ou ESC.

- Pressione a tecla ESC para voltar à tela de monitorização.

**ATENÇÃO:** Verifique se os valores inseridos manualmente estão corretos e correspondem aos valores capturados, para que os resultados apresentados não sejam incorretos.

### Procedimentos para gravar os valores Hemodinâmicos ou Ventilatórios do paciente no Histórico.

- Para gravar no histórico os valores Hemodinâmicos ou Ventilatórios do paciente, possibilitando a consulta posterior destes valores, deve-se proceder como segue abaixo.
- Selecione o controle GRAVAR, utilizando o Botão Rotacional e/ou Touch Pad.
- Pressione o Botão Rotacional e/ou Touch Pad. Aparecerá uma tela de confirmação de Gravação dos valores (Fig. 25).

Confirma gravação dos valores?



Figura 25: Tela confirmação de gravação de dados.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

### Procedimento para demonstrar o histórico do paciente

- Selecione o controle HISTÓRICO, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*. Aparecerá uma tela de valores calculados com dados do paciente (Fig. 26/27).
- Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para selecionar os comandos vertical e horizontal para visualizar os valores do Histórico.


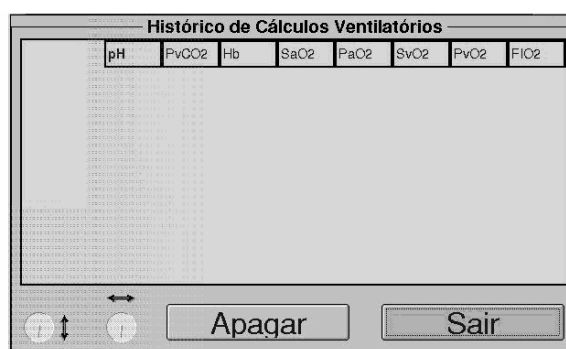


Figura 26: Histórico dos cálculos hemodinâmicos. Figura 27: Histórico dos cálculos ventilatórios.

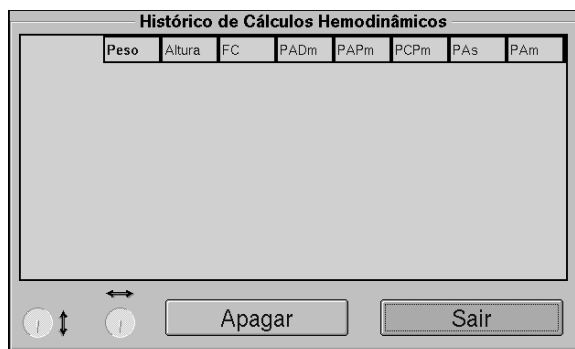

**Observação:**

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

## 5.6 Evolução

Esta ficha possui as sub-fichas de evolução gráfica e evolução tabular, com valores apresentados em intervalos de tempo, selecionados pelo usuário. De acordo com a versão do software esta evolução pode ser de até 96h.

**Evolução Tabular**

Esta ficha possibilita a apresentação na forma de tabela todos os parâmetros vitais em um determinado intervalo de tempo.

	FC	FR(bio)	IBP1m	IBP2m	FR(cap)	E
14:59	80	20	95	15	20	
14:58	80	20	95	15	20	
14:57	80	20	95	15	20	
14:56	80	20	95	15	20	
14:55	80	20	95	15	20	
14:54	80	20	95	15	20	
14:53	80	20	95	15	20	
14:52	80	20	95	15	20	
14:51	80	20	95	15	20	
14:50						
14:49						

Figura 28: Ficha de evolução tabular do paciente.

**Observação:**

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

**Procedimento para selecionar os parâmetros**

- Selecione o controle PARÂMETROS, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*. Aparecerá uma tela de seleção dos parâmetros da evolução

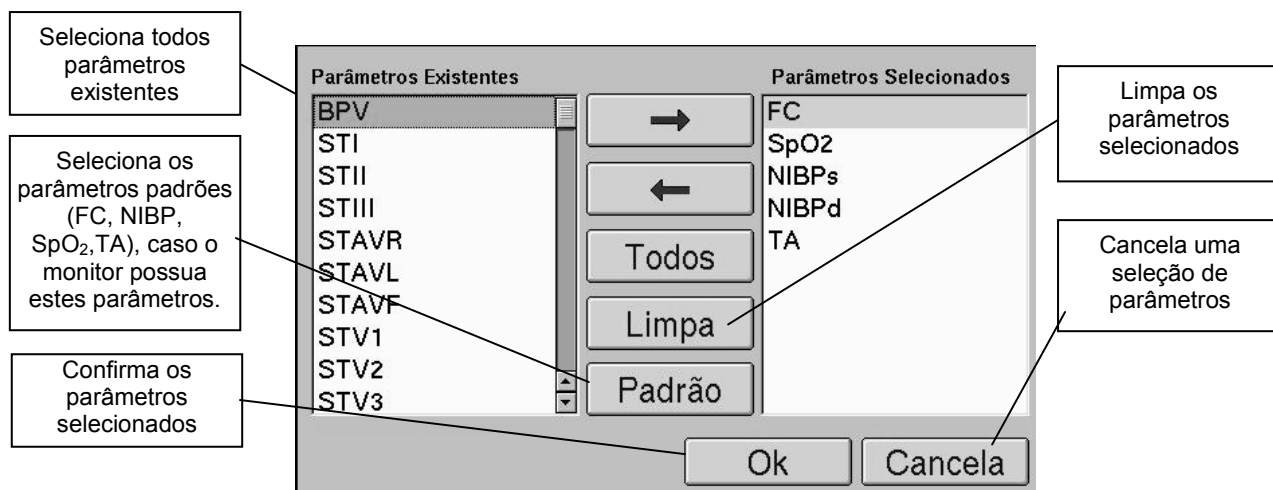


Figura 29: Ficha de parâmetros da evolução tabular.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

### Procedimento para selecionar o intervalo

- Selecione o controle INTERVALO, utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*. Aparecerá uma tela de intervalo da evolução tabular.

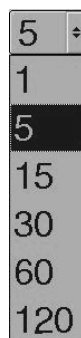


Figura 30: Tela de intervalo da evolução tabular.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

### Selecionando Intervalo de Tempo ou Parâmetros

- Selecione o controle Referência na ficha do menu

- Com o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* selecione o controle Referência para ajustar a hora base de visualização (hora a partir da qual serão visualizados os valores armazenados).
- Com o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* selecione o controle Referência para navegar pelos parâmetros fisiológicos armazenados que foram selecionados, possibilitando assim sua visualização.

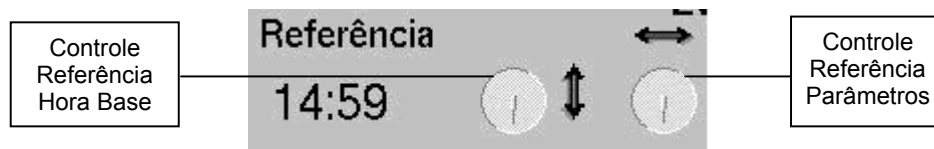


Figura 31: Controle Referência.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

### Evolução Gráfica

Esta sub-ficha possibilita a apresentação na forma de gráficos de mais de um parâmetro vital simultaneamente, selecionado pelo operador, em um determinado intervalo de tempo que pode ser configurado pelo operador. Utilizando os cursores existentes na ficha é possível navegar dentro do intervalo e saber o valor de cada parâmetro em cada momento.

### Procedimento para selecionar o Parâmetro da Evolução

- Selecione o controle EVOLUÇÃO GRÁFICA na ficha do menu. Aparecerá a listagem dos parâmetros (Fig. 32).
- Pressione o Botão Rotacional para acessar o controle de seleção de parâmetro, gire o mesmo para selecionar o parâmetro desejado (Fig. 32) e depois de escolhido pressione o Botão Rotacional para selecioná-lo, pode-se utilizar o clique do *Touch Pad* para esta função.

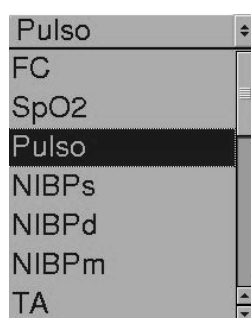


Figura 32: Seleção de parâmetro da evolução gráfica.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

## Procedimento para selecionar Tempo da Evolução

- Selecione o controle EVOLUÇÃO GRÁFICA na ficha do menu. Aparecerão as opções do tempo de evolução (Fig. 33).
- Pressione o Botão Rotacional para acessar a ficha de seleção de tempo, gire o mesmo para selecionar o tempo desejado (Fig. 33) e depois de escolhido pressione o Botão Rotacional para selecioná-lo, pode-se utilizar o clique do *Touch Pad* para esta função.

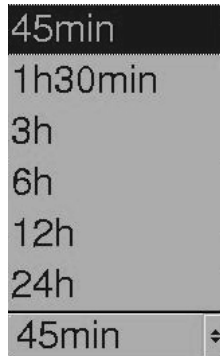


Figura 33: Seleção de tempo da evolução gráfica.

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

## 5.7 Lembretes

Esta ficha permite a configuração de um lembrete fixo e até 3 lembretes programáveis.

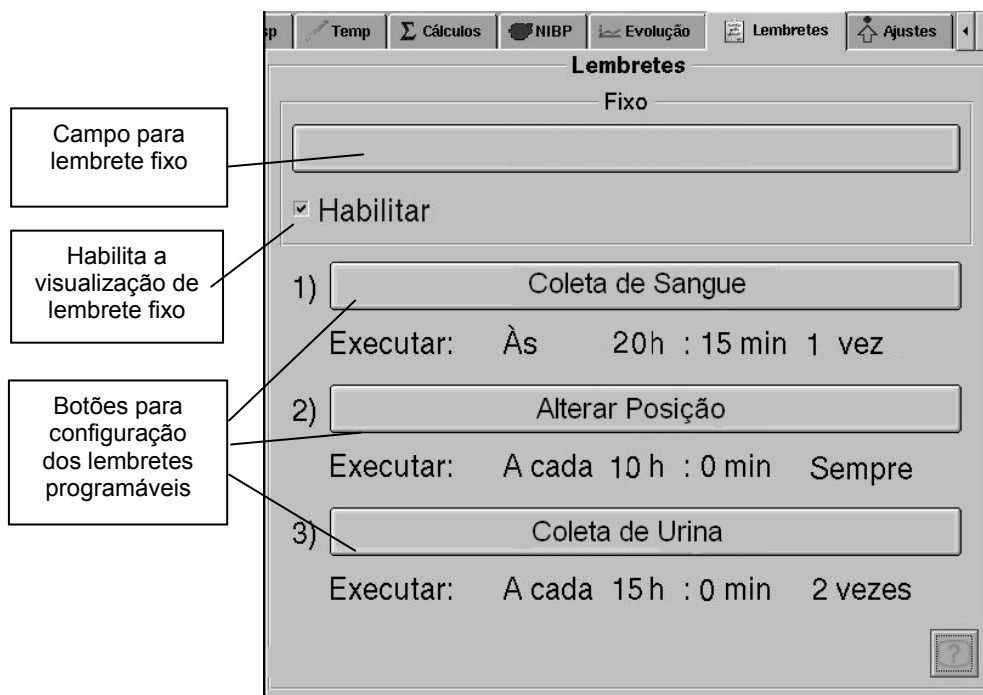


Figura 34: Ficha Lembretes

**Observação:**

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

O texto configurado para o lembrete fixo é apresentado na barra de status do monitor, ele é alternado com o nome do paciente.

Já os lembretes programáveis são apresentados em caixas de mensagens de acordo com horário ou período programado. Para que ele desapareça é necessário que o usuário clique no botão “OK” da caixa de mensagem.

Se o monitor estiver conectado a uma Central de monitorização DIXTAL é possível que estas programações sejam feitas na Central.

## 5.8 Eventos

Nesta ficha de Eventos é possível, dentre outras funcionalidades:

- Visualizar alarmes fisiológicos que aconteceram inclusive mostrando qual o limite que estava configurado para aquele parâmetro;
- Alarmes técnicos que aconteceram como desconexão de um sensor, por exemplo;
- Saber quando os alarmes foram silenciados e tiveram seu som reativado;
- Mudanças nas configurações de alarme, por exemplo, quando o tipo de alarme é mudado para um parâmetro;
- Arritmias;
- Ou outros eventos configurados pelo usuário;


Além disto, é possível filtrar somente os tipos de eventos que se deseja, por exemplo, os de arritmia; e visualizar até 20 segundos de curvas (sub-ficha FullDisclosure) do momento que o evento ocorreu.

Também é possível configurar que tipos de eventos o usuário deseja armazenar e se é ou não desejado gravar as curvas deste momento. Esta configuração é protegida por senha e é a mesma senha das opções avançadas mencionada na ficha de Ajustes.

## 5.9 Ajuda

Cada uma das fichas possui uma sub-ficha “Ajuda” que contém uma descrição básica sobre seus controles e funções.

Para visualizar a sub-ficha “Ajuda”:

- Selecione o controle  (Ajuda), utilizando o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad*.
- Pressione o Botão Rotacional ou clique (toque) no *Touch Pad*. Aparecerá uma tela com os tópicos de ajuda

- Utilize o Botão Rotacional e/ou *Touch Pad* para navegar na tela.

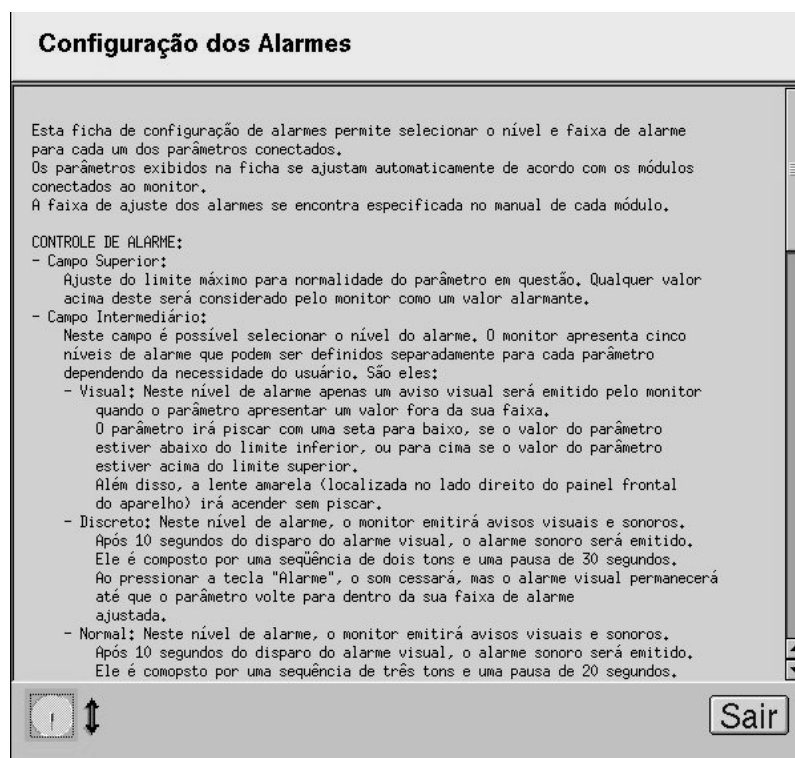


Figura 35: Exemplo de Sub-Ficha "Ajuda"

### Observação:

- 1) As telas podem variar conforme a configuração do equipamento, sendo a figura acima apenas ilustrativa.

# 6

## VISÃO DO PRODUTO

### 6.1 Visão Frontal

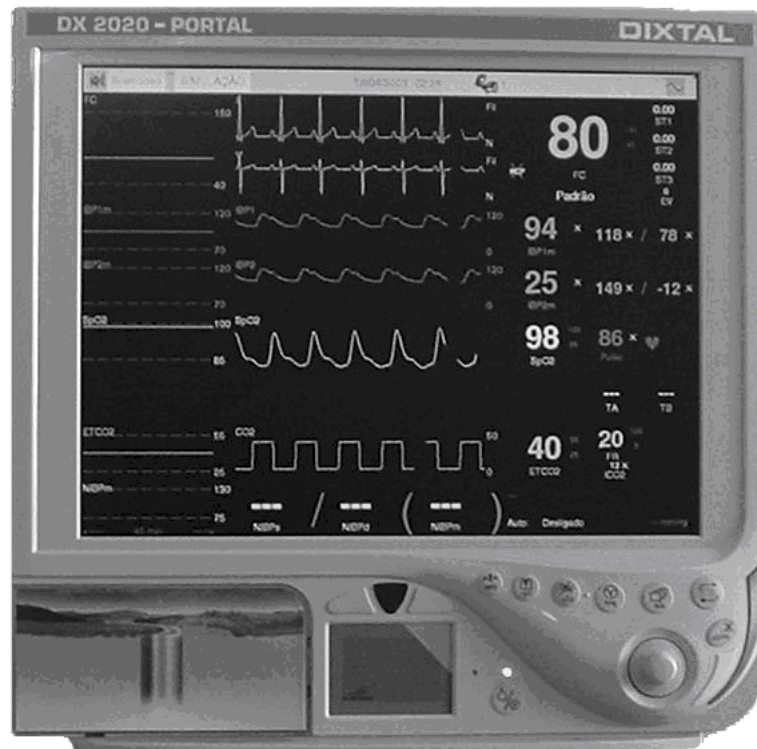


Figura 36: Visão Frontal.

- Painel de arte;
- Sensor foto-sensível;
- Botões de acesso rápido;
- Botão rotacional;
- Lentes de alarme;
- Telas de monitorização e tela de apoio clínico;
- Identificação do equipamento;

## 6.2 Visão Lateral



Figura 37: Visão lateral.

- Conector de Rede Ethernet, para conexão com central;
- Conectores padrão USB;
- Conector de Vídeo Externo;
- Porta Fusíveis de proteção;
- Entrada para cabo de rede elétrica;
- Terminal de equalização de potencial (Terra);
- Conectores dos parâmetros internos;
- Puxadores para desconexão dos módulos;



## 6.3 Visão Traseira



Figura 38: Visão traseira.

- 5 trilhos para conexão dos módulos externos (opcionais) sendo que o último (inferior) pode receber o módulo de Bateria (opcional);
- Etiquetas de identificação de registro e de número de série do monitor;
- Dissipador da fonte, responsável pela dissipação do calor gerado pela fonte;
- Alça para transporte;

## 6.4 Visão das Partes do Monitor



Figura 39: Visão das partes que acompanham o monitor.

- Monitor DX 2020;
- Manual de Operação do monitor e dos módulos internos de acordo com a configuração do monitor;
- Cabo de força;
- Acessórios de acordo com a configuração do monitor;

# 7

# MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO

## 7.1 Manutenção Corretiva

Sempre que for necessário o reparo do aparelho, este só deverá ser efetuado pela DIXTAL ou pela Rede Credenciada DIXTAL de Assistência Técnica, de modo a garantir a confiabilidade do aparelho e a validade do Certificado de Garantia DIXTAL.

## 7.2 Manutenção Preventiva Técnica

Para assegurar uma maior confiabilidade do aparelho, o usuário deve, anualmente, solicitar uma manutenção preventiva à DIXTAL.

Esta manutenção consiste de:

- Avaliação da calibração;
- Medida da isolação elétrica do aparelho;
- Medida de corrente de fuga;
- Teste de vibração;
- Verificação dos contatos elétricos;
- Verificação dos parafusos;
- Verificação dos indicadores sonoro e visual.

Realizando esta manutenção, evita-se eventuais falhas no aparelho, riscos de leituras incorretas e a necessidade de manutenção corretiva.

### Observação:

- 1) Essa manutenção deverá ser realizada apenas pela DIXTAL ou pela Rede Credenciada DIXTAL de Assistência Técnica, pois requer acesso a partes internas do aparelho.

## 7.3 Manutenção Preventiva Pelo Usuário

A cada três meses, o usuário deve verificar a ocorrência das seguintes anormalidades no aparelho:

- Ressecamento de borrachas e conexões.
- Trincamento de partes plásticas e conectores.
- Oxidação de partes metálicas.
- Rompimento de cabos.

- Falhas no alarme sonoro ou visual.

Constatado qualquer um desses problemas, entrar em contato com a DIXTAL ou com a Rede Credenciada DIXTAL de Assistência Técnica para que as medidas necessárias sejam tomadas o mais breve possível, evitando maiores transtornos ou danos.

## 7.4 Limpeza e Desinfecção

Abaixo seguem instruções que devem ser seguidas rigorosamente sempre que for necessário limpar e/ou esterilizar o aparelho e seus acessórios. Sugerimos que tais medidas sejam efetuadas no mínimo a cada três meses, ou períodos menores sempre que for evidente a existência de sujeira ou contaminação.

Não se recomenda esterilizar o equipamento por qualquer técnica que utilize líquido ou vapor.

### Cuidados Quanto a Limpeza e Desinfecção do Aparelho

- Não deixe que líquidos caiam ou penetrem no equipamento. Caso isto aconteça, desligue imediatamente o aparelho e entre em contato com a assistência técnica autorizada.
- Não tente esterilizá-lo por autoclave ou qualquer outra técnica de imersão em desinfetante, líquido ou vapor.
- Desligue sempre o monitor e desconecte-o da tomada de energia antes de iniciar a limpeza.

Consulte o Departamento de Controle de Infecção de seu hospital para utilizar as políticas de desinfecção adequadas.

Algumas sugestões sobre limpeza e desinfecção são apresentadas a seguir, mas o Departamento de Controle de Infecção do hospital deve ser consultado.

### Partes Externas do Aparelho

- Quando necessário utilize apenas um pano limpo e macio levemente umedecido em água morna e sabão neutro para limpá-lo, retirando possíveis excessos com outro pano limpo e seco.
- Não utilize nenhum produto químico como derivados de thinner, álcool ou gasolina para limpar o equipamento e seus acessórios.
- Jamais imergir o aparelho em líquidos.
- A tela de cristal líquido deve ser limpa apenas com uma flanela seca, sem líquidos e sem esforço mecânico sobre a mesma.

### Módulos

- Não esterilize os módulos e seus acessórios.
- Não utilize nenhum produto químico como derivados de thinner, álcool ou gasolina para limpar os módulos e seus acessórios.

- Quando necessário utilize apenas um pano limpo e macio levemente umedecido em água morna e sabão neutro para limpá-lo, retirando possíveis excessos com outro pano limpo e seco.
- Nunca molhe os conectores.

### **Cabos e Sensores**

- Limpe-os com um pano limpo e macio levemente umedecido em água morna e sabão neutro, retirando possíveis excessos com outro pano limpo e seco.
- Nunca imergir.
- Não esterilizar.

### **Proteção Ambiental**

Os equipamentos e acessórios aprovados pela DIXTAL não apresentam riscos ao final de sua vida útil.

Os acessórios aprovados pela DIXTAL são biocompatíveis e seguem as diretrizes das normas **NBR ISO 10993-1** e **NBR IEC 60601-1**.

O descarte de equipamentos e acessórios reutilizáveis e/ou descartáveis deve seguir as Boas Práticas Hospitalares a fim de evitar qualquer tipo de contaminação.

## **7.5 Substituição dos Fusíveis**

Dependendo da configuração, o equipamento possui módulo de entrada com chave LIGA/DESLIGA (I/O) e/ou Porta Fusíveis, sendo que os fusíveis devem ser substituídos quando necessário.

Para substituir os fusíveis:

- Certifique-se que o monitor esteja desligado e desconectado da rede elétrica.
- Usando uma chave de fenda, abra a porta do compartimento de fusíveis.



Figura 40: Retirar porta fusível.

- Retire o compartimento dos fusíveis do módulo de potência.

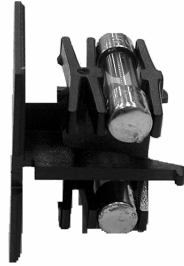


Figura 41: Porta fusível.

- Substitua o(s) fusível(is) danificado(s) por outro(s) de mesmo tipo e valor.

<b>Tensão Elétrica</b>	<b>Fusíveis com Retardo 5x20</b>
100 - 240VAC	3,15A

- Recoloque o compartimento de fusíveis.
- Ao recolocar o compartimento de fusíveis no módulo de potência certifique-se que o mesmo esteja corretamente alocado.
- Feche a porta do compartimento de fusíveis.

## 8

# PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Este capítulo traz possíveis soluções para alguns problemas que podem ocorrer com o aparelho e que podem ser solucionados pelo próprio usuário. Se o problema persistir e o aparelho não funcionar adequadamente após a verificação indicada, entrar em contato com a DIXTAL ou com a Rede Credenciada de Assistência Técnica para que as medidas cabíveis sejam tomadas o mais breve possível.

**Tabela 4: Problemas e soluções.**

PROBLEMAS	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Aparelho ligado não funciona ao ser acionada a chave liga/desliga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Falta de energia.</li> <li>2) Cabo de força defeituoso.</li> <li>3) Fusíveis de entrada AC danificados</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verificar o cabo de força.</li> <li>2) Trocar o cabo de força.</li> <li>3) Trocar os fusíveis danificados</li> </ol>
Interferências na curva e medidas de parâmetros	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mau posicionamento do cabo paciente.</li> <li>2) Cabo paciente defeituoso.</li> <li>3) Interferência de outros aparelhos elétricos</li> <li>4) Módulo mal posicionado.</li> <li>5) Operação incorreta do usuário.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Procure posicionar o cabo paciente de forma que a caixa de onde saem os rabichos fique sobre o paciente. De preferência prenda esta caixa na cintura do paciente. Evite que o cabo paciente corra paralelo ao cabo de força.</li> <li>2) Troque o cabo paciente por outro cabo.</li> <li>3) Evite ligar motores elétricos e computadores no mesmo circuito em que estiver ligado o aparelho. Evite operações nas proximidades do aparelho que gerem campos magnéticos intensos.</li> <li>4) Verificar posicionamento e colocação dos módulos no aparelho.</li> <li>5) Desligar e ligar o aparelho para reiniciá-lo. Ler com atenção o Manual de Operação para evitar uma seqüência errônea de acionamento das teclas de comando.</li> </ol>

## 9

## ACESSÓRIOS

Os acessórios que acompanham o equipamento dependem da configuração adquirida pelo cliente.

Utilizar somente acessórios aprovados pela DIXTAL os quais fornecem proteção contra os efeitos de um desfibrilador e contra queimaduras.

Para adquirir qualquer acessório listado abaixo entrar em contato com algum dos representantes autorizados ou com a própria DIXTAL.

É muito importante que a solicitação de qualquer acessório seja feita com antecedência para evitar que a utilização do equipamento seja interrompida devido ao processo de aquisição.

**ATENÇÃO:** Devem ser utilizados somente acessórios biocompatíveis com as diretrizes das normas **ISO 10993-1** e **NBR IEC 60601-1**.

Acessórios de uso exclusivo nos equipamentos DIXTAL.

DESCRIÇÃO	FABRICANTE	CÓDIGO
Manual de operação	Dixtal Biomédica	V2-U0L06-0
Central de monitorização Dixtal	Dixtal Biomédica	-----
Rack para 3 Módulos	Dixtal Biomédica	DX-0JC0L-0
Rack para 6 Módulos	Dixtal Biomédica	DX-0JC3L-0
Cabo para aterramento	Dixtal Biomédica	F7-00003-0

Acessórios de uso comum, desde que atenda as especificações e/ou recomendações da DIXTAL e possuam registro na ANVISA (quando aplicável).

DESCRIÇÃO	FABRICANTE	CÓDIGO
Fusível com retardo 5x20 / T 3,15A H 250VAC	Fusibras Avnet Electronics	20-0000N-0
Cabo de rede com tomada IEC	VegFlex Ind. Com Ltda	F7-00002-0
Conversor DC/AC	Xantrex	GF-00001-0
Impressora jato de tinta	HP Samsung Canon Xerox LexMark	VR-R0005-1
Impressora Laser	HP Samsung Canon Xerox LexMark	VR-R0006-0



**Observação:**


- 1) Demais acessórios, consultar os Manuais de Operação dos Módulos de Expansão.

**Figuras ilustrativas dos acessórios DX 2020**

Central de Monitorização



Rack para 3 Módulos

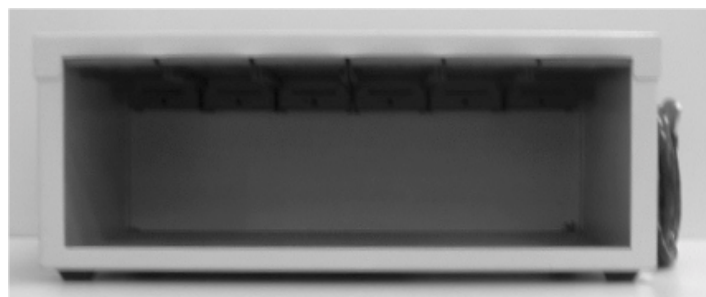

Rack para 6 Módulos

# 10

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## 10.1 Descrição do Produto

### COMPOSIÇÃO

Sistema Modular DX 2020 o qual permite flexibilidade na monitorização de vários parâmetros fisiológicos (unidades fisiológicas), com possibilidade de configuração pelo usuário, dentro das seguintes opções:

Módulos que podem ser internos (pré-configurados):

- ECG, Respiração e Temperatura (ECG – 7 ou 12 derivações);
- Pressão Arterial Não Invasiva (NIBP);
- Oximetria (SpO<sub>2</sub>);
- Análise de Arritmia e ST;

Módulos que podem ser conectados externamente:

- Débito Cardíaco / Débito Cardíaco contínuo;
- Capnografia (EtCO<sub>2</sub>) / Capnografia II (EtCO<sub>2</sub>) / Capnografia III (Microstream®)
- Pressão Arterial Invasiva e Hemodinâmica (IBP e IBP *Plus*);
- Índice Bi-Espectral Eletromiograma (BIS/EMG);
- Eletroencefalografia (EEG);
- Transmissão Neuromuscular;
- Saturação Venosa de Oxigênio;
- Fração Inspirada de Oxigênio (FiO<sub>2</sub>);
- Analisador de Gases (GAS);
- Registrador Térmico (REG);
- Ventilação (VENT);
- Interface (DX-COM);
- Interface Pressão Transcutânea (PtcO<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>);
- Bateria;

Verificar com a DIXTAL ou um de seus representantes legais sobre outras possíveis opções.

Informações completas sobre a utilização de cada parâmetro estão descritas em seus respectivos manuais de operação.

## Principais Características

- Sistema Modular que permite flexibilidade na monitorização de vários parâmetros fisiológicos, com possibilidade de configuração pelo usuário.
- Eventos ajustáveis pelo usuário.
- Ajuda na tela.
- Operação através de menu de fichas.
- Configuração Automática através da inserção/retirada do módulo externo.
- Integração com Central de Monitorização Fisiológica.
- Possibilidade de Impressão de dados e ondas por impressora laser ou jato de tinta.
- Possibilidade de evolução dos parâmetros em formatos gráficos ou numéricos.
- Alarmes auditivos e visuais, ajustáveis para os parâmetros.
- Módulo de bateria recarregável tornando-o independente da disponibilidade de energia da rede elétrica.

## 10.2 Classificação e Normalização

CLASSIFICAÇÃO	
Classificação de acordo com a RDC 185 – (ANVISA)	Classe III, Regra 10.
Classificação de acordo com a Diretiva Européia MDD 93/42/EEC	Classe IIb, Regra 10.
Grau de proteção contra choque Elétrico	Equipamento de Classe I. Equipamento energizado internamente. Equipamento com parte aplicada tipo BF/CF.
Proteção contra a penetração nociva de água	Equipamento à prova de pingos IPX1 (equipamento fechado protegido contra pingos de água).
Modo de operação do aparelho	Operação contínua.

NORMALIZAÇÃO	
Annex X of MDD 93/42/EEC	Essential Requirements of MDD 93/42/EEC
EN ISO 13485:2003 ISO 13485:2003 ABNT NBR ISO 13485:2004	Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes
EN ISO 14971:2000 + A1:2003 ISO 14971:2000 ABNT NBR ISO 14971:2004	Medical devices – Application of risk management to medical devices
EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995 + A13:1996 IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 ABNT NBR IEC 60601-1:1997	Medical Electrical equipment – Part 1: General requirements for safety
EN 60601-1-1:2001 IEC 60601-1-1:2000 ABNT NBR IEC 60601-1-1:2004	Medical electrical equipment – Part 1-1: General requirements for safety – Collateral Standard: Safety requirements for medical electrical systems
EN 60601-1-2:2005 IEC 60601-1-2:2004 ABNT NBR 60601-1-2:2006	Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for safety – Collateral standards: Electromagnetic compatibility – Requirements and tests

EN 60601-1-4:1996+A1:1999 IEC 60601-1-4:1996+A1:1999 ABNT NBR IEC 60601-1-4:2004	Medical electrical equipment – Part 1-4: General requirements for safety – Collateral standards: Programmable electrical medical systems
EN 60601-1-6:2004 IEC 60601-1-6:2004	Medical electrical equipment – Part 1-6: General requirements for safety – Collateral Standard: Usability
EN 60601-1-8:2004 IEC 60601-1-8:2003	Medical electrical equipment – Part 1-8: General requirements for safety – Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
EN 60601-2-49:2001 IEC 60601-2-49:2001 ABNT NBR IEC 60601-2-49:2003	Medical electrical equipment – Part 2-49: Particular requirements for the safety of multifunction patient monitoring equipment
EN 980:2003	Graphical symbols for use in the labeling of medical devices
EN 1041:1998	Information supplied by the to manufacturer of medical devices
<p>Electromagnetic emissions: In conformity with the EMC 93/42/EEC directive, CISPR Class A. Tested to EN55011 (1998) and CISPR11 (1999).</p> <p>Electromagnetic immunity: In conformity with the EMC 93/42/EEC directive. Tested to IEC60601-1-2 (2004), IEC61000-4-2 (1999) ESD, IEC61000-4-3 (1998) RF, IEC61000-4-4 (1995) Burst , IEC61000-4-5 (1995) Surge immunity test, IEC61000-4-6 (2001) Immunity to conducted disturbances, IEC61000-4-8 (2001) Magnetic fields, IEC61000-4-11 (2001) Voltage dips, IEC61000-3-2 (2001) Limits for harmonic current emissions, IEC61000-3-3 (2002) Power fluctuations and oscillation.</p>	

## DECLARAÇÃO DE EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS

TESTE DE EMISSÕES	NÍVEIS DOS TESTES EN IEC 60601-1-2	AMBIENTE ELETROMAGNÉTICO
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	O Monitor Portal, modelo DX 2020 usa energia RF somente em suas funções internas. Portanto, suas emissões RF são muito baixas e não causam interferência nos equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões RF CISPR 11	Classe A	O Monitor Portal, modelo DX 2020 é adequado ao uso em todo estabelecimento outro que doméstico e aqueles conectados diretamente à rede pública de fornecimento de energia que atende aos edifícios domésticos.
Emissões Harmônicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Flutuações de voltagem/ Emissões de “flicker” IEC 61000-3-3	Atende	

## DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA

TESTE DE IMUNIDADE	NÍVEIS DOS TESTES EN IEC 60601-1-2	AMBIENTE ELETROMAGNÉTICO
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 6kV contato ± 8kV ar	O piso deve ser de madeira, concreto ou cerâmico. Se o piso é coberto de material sintético, a umidade relativa deve ser no mínimo 30 %.

RF Irradiada IEC 61000-4-3	3V/m 80 MHz até 2,5GHz	O Monitor Portal, modelo DX 2020 é adequado ao uso em todo estabelecimento outro que doméstico e aqueles conectados diretamente à rede pública de fornecimento de energia que atende aos edifícios domésticos.
Transitórios Elétricos rápidos /burst IEC 61000-4-4	± 2kV for power supply lines ± 1kV for input/output Lines	A qualidade da rede elétrica deve ser de um ambiente comercial típico ou ambiente hospitalar.
Picos de tensão IEC 61000-4-5	± 1kV line(s) to line(s) ± 2kV line(s) to earth	A qualidade da rede elétrica deve ser de um ambiente comercial típico ou ambiente hospitalar.
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3Vrms 150 kHz até 80 MHz fora da banda ISM	A qualidade da rede elétrica deve ser de um ambiente comercial típico ou ambiente hospitalar.
Campo Magnético IEC 61000-4-8	3A/m	Se ocorrer distorção da imagem, pode ser necessário alterar a posição do Monitor Portal DX 2020 para longe das fontes de energia geradora de campo magnético ou instalar escudos eletromagnéticos. O campo magnético deve ser medido no local desejado para a instalação a fim de garantir que é baixo o suficiente.

TESTE DE IMUNIDADE	NÍVEIS DOS TESTES EN IEC 60601-1-2	AMBIENTE ELETROMAGNÉTICO
Quedas de Tensão, Interrupções curtas e Flutuação de tensão nas Linhas de Entrada de Tensão IEC 61000-4-11	<5 % $U_T$ (>95 % dip em $U_T$ ) para meio ciclo  40 % $U_T$ (60 % dip em $U_T$ ) para 5 ciclos  70 % $U_T$ (30 % dip em $U_T$ ) para 25 ciclos  <5 % $U_T$ (>95 % dip em $U_T$ ) para 5s	A qualidade da rede elétrica deve ser de um ambiente comercial típico ou ambiente hospitalar. Se o usuário do Monitor DX 2020 requer uso contínuo durante interrupções, é recomendado que o monitor seja alimentado através de uma fonte ininterrupta de tensão (No-Break) ou Bateria.

### Declaração de Imunidade a Equipamentos de RF

O Monitor Portal, modelo DX 2020 é destinado à utilização em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF são controladas. O usuário pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética, mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF (transmissores) moveis e portáteis conforme recomendado abaixo, de acordo com a máxima potência de saída do equipamento de comunicação.			
Potência Máxima de Saída do Transmissor (W)	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)		
	150 kHz até 80 MHz	80 MHz até 800 MHz	800 MHz até 2,5 GHz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

## 10.3 Especificações Gerais

Software:	SBMAME5K
Tipo de Vídeo:	Cristal Líquido Colorido de Matriz Ativa Tamanho da tela: 15" (diagonal) Resolução: 1024 x 768 pontos
Dimensões:	375 x 375 x 235mm (altura x largura x profundidade)
Peso:	6,8kg (sem os módulos externos)
Alimentação:	Voltagem: 100 - 240VAC Frequência: 50/60Hz Potência: 240VA Fusíveis de retardo 5x20 / T3,15A H 250VAC
Condições ambientais:	Temperatura de operação: +10°C (50°F) a +40°C (104°F) Temperatura de armazenagem: -10°C (14°F) a +55°C (131°F) Umidade relativa do ar: 10% a 90 % (sem condensação) Pressão atmosférica: 525mmHg a 760mmHg

### Observações:

- 1) A DIXTAL fornece documentação técnica necessária à manutenção dos equipamentos ao pessoal técnico do usuário qualificado por ela.
- 2) Indicações de aterramento, classificação, condições ambientais, segurança, modelo, modo de operação, etc estão contidas no capítulo segurança.
- 3) Indicação de origem do produto está contida no capítulo Dados do Fabricante.
- 4) Informações completas sobre o módulo de bateria estão contidas no manual do módulo.

# 11

## TERMO DE GARANTIA

A DIXTAL BIOMÉDICA IND. E COM. LTDA., nos limites fixados neste certificado, assegura ao comprador/consumidor deste equipamento, garantia contra qualquer defeito material ou de fabricação apresentado no prazo de 365 dias (90 dias de Garantia Legal mais 275 dias de Garantia Contratual), contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto.

Limita-se a responsabilidade da DIXTAL BIOMÉDICA a reparar, substituir peças defeituosas ou a seu critério, substituir o produto, desde que seu departamento técnico ou oficina credenciada constate falha em condições normais de uso. Não estão incluídos nesta garantia cabeças de impressoras, tubos de raios catódicos, fusíveis e todos os itens considerados acessórios, que possuem condições de garantia específicas, conforme descrito no “Manual de Operação” do produto.

A presente garantia ficará nula e sem efeito se o produto sofrer danos provocados por acidente, agente da natureza, uso em desacordo com o manual de operação, utilização de acessórios não homologados pela DIXTAL, instalações elétricas inadequadas ou sujeitas a flutuações excessivas da rede elétrica e se apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela DIXTAL BIOMÉDICA.

As eventuais perdas e danos ao comprador pelo mau funcionamento ou paralisação do produto, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

Obriga-se a DIXTAL BIOMÉDICA a prestar serviços tanto gratuitos como remunerados exclusivamente nas localidades nas quais mantenha oficinas próprias ou devidamente credenciadas.

As despesas de frete, transporte e embalagem correm por conta do comprador/consumidor, exceto nos casos cobertos pela garantia.

Se a propriedade do produto for transferida durante o período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro comprador/consumidor.

Este certificado de garantia constitui o único termo de responsabilidade da DIXTAL BIOMÉDICA não estando nenhum representante autorizado a abrir exceções em seu nome.

Reclamações de danos durante transporte devem ser registrados imediatamente junto à empresa transportadora. Toda a correspondência referente ao equipamento deve especificar o nome, modelo e o número de série como descrito no equipamento.

**12**

# DADOS DO FABRICANTE

Registro na ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE: xxxxxxxx

Declaramos que as informações prestadas neste relatório são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na empresa.

ENG<sup>o</sup> RAFAEL HOLZHACKER  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA 5060646464-D

SIMONE HOLZHACKER  
RESPONSÁVEL LEGAL

## Produto fabricado por

DIXTAL Biomédica Indústria e Comércio Ltda.  
Av. Rodrigo Otávio, 1111 Japiim I  
Fone/Fax: (0XX92) 3613-2010/2015  
CEP 69.077-000 Manaus – AM – Brasil  
CNPJ: 63.736.714/0001-82

## Disque DIXTAL – Atendimento ao Consumidor

\* São Paulo – (0XX11) 5548-4155 Fax: (0XX11) 5548-4883  
[www.dixtal.com.br](http://www.dixtal.com.br)



**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA